

WIDEX CLEAR™ 330

STAY IN SYNC WITH LIFE

NÁVOD K POUŽITÍ
ŘADA CLEAR™ 330

C3-FS

Sluchadlo s reproduktorkem
ve zvukovodu / v uchu
RIC/RITE

VAŠE SLUCHADLO WIDEX CLEAR™330

(Vyplní lékař)

Datum: _____

Typ baterie: _____

OBSAH

SYMBOLY	4
SLUCHADLO	5
Rozlišení pravého/levého sluchadla.....	8
Zvuková signalizace	8
Baterie.....	9
Vložení baterie.....	9
Signalizace slabé baterie	12
Zapnutí a vypnutí sluchadla	13
Nastavení hlasitosti.....	14
Poslechové programy.....	17
Přepínání poslechových programů.....	20
Zen+.....	21
Telefon+.....	21
Telefonování.....	22
Nasazení sluchadla	23
Sundání sluchadla	24
Čištění	25
PŘÍSLUŠENSTVÍ	27
PROBLÉMY A JEJICH ODSTRANĚNÍ	28
PÉČE O VAŠE SLUCHADLO	31
VAROVÁNÍ	32
INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ SLUCHADEL	35
INFORMACE PRO ÚŘADY	36

SYMBOLY

Následující symboly budou používány v celém tomto návodu:



Zprávy s tímto záhlavím (Varování) označují vážné nepříznivé účinky, potenciální bezpečnostní rizika nebo chybnou funkci zařízení.



Zprávy s tímto záhlavím (Upozornění) označují nebo obsahují informace, na které je nutno reagovat se zvýšenou pozorností.




■ Nevhazujte do běžného odpadu.

SLUCHADLO

Na obrázku níže je zobrazeno sluchadlo bez ušní sady. Výběr ušní sady závisí na Vašich specifických potřebách. Přečtěte si prosím samostatný návod na používání ušní sady.

1. Vypínač
2. Bateriové pouzdro s výstupkem pro nehet
3. Tlačítko pro přepínání programů
4. Světelná dioda / Identifikační značka

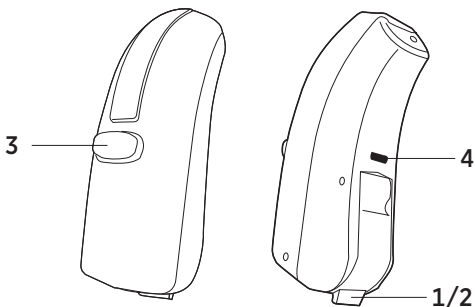

POZNÁMKA

Společně s tímto návodem k použití je k dispozici také uživatelská příručka o různých typech ušních sad, které jsou pro Vaše sluchadla k dispozici: „Ušní sady pro závěsná sluchadla Widex“.



VAROVÁNÍ

Tento návod a příručka „Ušní sady pro závěsná sluchadla Widex“ obsahují důležité informace a instrukce. Přečtěte si tyto brožury pozorně, dříve, nežli začnete svá sluchadla používat.

POZNÁMKA

Vaše sluchadlo, ušní sada a příslušenství nemusí vypadat přesně podle obrázků v této příručce. Rovněž si vyhrazujeme právo na provedení jakýchkoliv nezbytných změn.

Účel použití

Sluchadla CLEAR jsou určena pro celodenní používání ve všech zvukových prostředích jako pomůcky pro zesílení zvuků. Sluchadla CLEAR mohou mít doplňkový program Zen, který vytváří relaxační zvukové pozadí (například hudební nebo šumové) pro dospělé, kterým se takové zvukové podbarvení v tichu líbí.

Indikace k použití


Tato sluchadla jsou indikována pro celý rozsah poruch sluchu od nejlehčích (16 dB HL – 25 dB HL) až po nejtěžší ztráty sluchu (90+ dB HL), pro všechny typy nedoslýchavostí.

Musí být předepsána a seřizena sluchadlovými odborníky (lékař foniatrie a ORL, audiolog), vyškolenými v oboru rehabilitace sluchu, kteří mají atest na předepisování sluchadel.

Popis sluchadla

Vaše sluchadlo CLEAR™ se používá s ušní sadou, která se skládá z hadičky a z ušní koncovky, ve které je umístěn reproduktorek. Tato sluchadla používají patentovanou bezdrátovou technologii WidexLink, která zajišťuje komunikaci mezi levým a pravým sluchadlem a mezi sluchadly a příslušenstvím DEX.

Vaše sluchadla CLEAR mohou být podle přání vybavena doplňkovým programem Zen. Tento program přehrává na pozadí harmonické hudební zvuky (nebo šumové ruchy). Tyto zvuky jsou přizpůsobeny Vaší sluchové ztrátě.

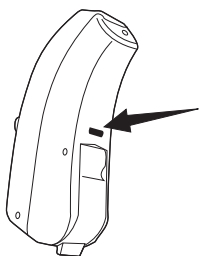

Rozlišení pravého/levého sluchadla

Šipka ukazuje polohu identifikační značky (červená značka = pravé sluchadlo a modrá značka = levé sluchadlo).

Zvuková signalizace

Sluchadlo může být nastaveno tak, aby vydávalo signál, který oznamuje používání určitých funkcí. Tímto signálem může být hlasová zpráva nebo tóny nastavené lékařem po konzultaci s Vámi. Tuto signalizaci je rovněž možné vypnout.

Nastavení hlasitosti (pomocí dálkového ovladače)		Tón *	Vypnuto
Potvrzení použití tlačítka programů		Cvaknutí	Vypnuto
Změna programu	Zpráva	Tóny	Vypnuto
Zapnutí sluchadla	Zpráva	Tón	Vypnuto
Varování - slabá baterie	Zpráva	4 tóny	Vypnuto
Varování - ztráta komunikace s druhým sluchadlem	Zpráva		Vypnuto
Připomenutí servisu	Zpráva		Vypnuto

* tučné písmo označuje standardní nastavení

Baterie

Doporučujeme používat baterie typu **zinek-vzduch**. Pro Vaše sluchadlo používejte baterii **velikosti 312**.

Potřebujete-li náhradní baterie, obraťte se prosím na svého lékaře. Je důležité věnovat pozornost datu použitelnosti a doporučením pro likvidaci použitých baterií, která jsou uvedena na obalu baterie. Jinak hrozí nebezpečí, že životnost baterie může být snížena.

Vložení baterie




Před vložení nové baterie do sluchadla nezapomeňte z baterie odstranit nálepku. Po odstranění nálepky začne baterie po několika vteřinách pracovat.




UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte baterie, pokud jsou na nich lepkavé zbytky z nálepky nebo jiné nežádoucí materiály, protože to může mít za následek nesprávnou funkci sluchadla.

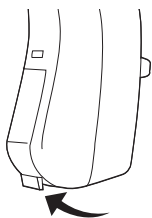

Pomocí výstupku pro nehet jemně otevřete pouzdro baterie. Nevyklápějte bateriové pouzdro více než do otevřené polohy.

Baterii vložte do pouzdra tak, aby symbol plus pólu (+) směřoval nahoru. Pro snadnější vložení baterie můžete použít magnet, který je součástí balení.

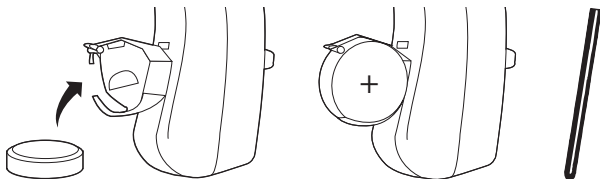


Pokud nejde pouzdro baterie dovřít, je baterie vložena nesprávně.

Výměnu baterie doporučujeme provádět nad stolem.



Sluchadlo může být vybaveno pouzdrum baterie bez výstupku pro nehet, což znamená, že k jeho otevření budete potřebovat nějaký nástroj. Tento typ pouzdra doporučujeme zejména, pokud sluchadlo bude používat dítě. Pro tento typ pouzdra se dodává i speciální nástroj na jeho otevření.

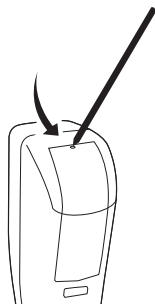

Jak se toto pouzdro baterie otevře, vidíte na obrázku.

Signalizace slabé baterie

Je-li baterie již téměř vybitá, ozve se zvukový signál – pokud tato funkce není vypnuta (viz strana 8). Doporučujeme, abyste měli vždy připravenou náhradní baterii.



VAROVÁNÍ

Nikdy nenechávejte vybitou baterii ve sluchadle. Vybité baterie mohou vytéci, což by mohlo sluchadlo poškodit.




VAROVÁNÍ


Vaše sluchadlo může přestat fungovat, například pokud dojde k vybití baterie. Na tuto možnost byste měli vždy pamatovat, zejména pokud se pohybujete v silničním provozu nebo musíte sledovat jiné výstražné signály.

Zapnutí a vypnutí sluchadla

Pouzdro baterie sluchadla slouží zároveň jako vypínač.

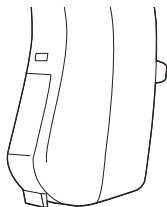

Sluchadlo zapnete uzavřením bateriového pouzdra. Zapnutí sluchadla bude indikováno zvukovým signálem, pokud tato funkce nebyla vypnuta.

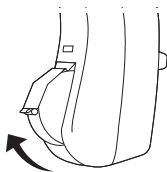

Pokud chcete sluchadlo vypnout, otevřete nepatrně bateriové pouzdro - dokud neucítíte cvaknutí.

Pokud sluchadlo nepoužíváte, nezapomeňte jej vždy vypnout. Jestliže nebude sluchadlo používáno po dobu několika dní, vyjměte z něj baterii.

Nastavení hlasitosti

Sluchadlo si nastavuje hlasitost automaticky podle okolního zvukového prostředí.

Pokud máte dálkový ovladač, můžete si doladit ručně nastavení hlasitosti nebo sluchadlo zcela ztišit. Jakékoli nastavení hlasitosti bude zrušeno při vypnutí sluchadla nebo změně programu.

Jakákoli změna hlasitosti prostřednictvím dálkového ovladače se projeví u obou sluchadel.

Možnost změny nastavení velikosti kroku, po kterých se zvyšuje nebo snižuje hlasitost, konzultujte se svým lékařem.

Pokud používáte dálkový ovladač, přečtěte si také návod k jeho použití.



VAROVÁNÍ

Vaše sluchadla jsou velmi výkonná. Nepoužívejte je delší dobu nastavené na nepříjemně hlasitý poslech – mohlo by dojít k poškození Vašeho sluchu.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je hlasitost sluchadla obecně příliš vysoká nebo příliš nízká, pokud jsou reprodukovány zvuky zkreslené nebo potřebujete jakékoli další informace, obraťte se na svého lékaře.

Ztlumení sluchadla pomocí dálkového ovladače:

Držte stisknuté tlačítko pro snížení hlasitosti na dálkovém ovladači, dokud nezazní dlouhý tón. Dalším krátkým stisknutím jednoho z tlačítek pro nastavení hlasitosti, se zvuk opět zapne.

Signalizace přerušení komunikace s druhým sluchadlem

(Poznámka: je k dispozici pouze v případě, že používáte dvě sluchadla a tato funkce byla aktivována Vaším lékařem)

Pokud Vám jedno ze sluchadel spadne z ucha dolů a/ nebo je vybitá baterie, ozve se ve druhém sluchadle dvakrát zvukový signál a hlasová zpráva, a na obou sluchadlech začne blikat světelná dioda.

Po novém nasazení ztraceného sluchadla a/nebo výměně baterie přestane dioda blikat.

Poslechové programy

Ve Vašem sluchadle mohou být nastaveny až čtyři programy z následující nabídky a doplňkový Zen program, nazývaný Zen+.

<input type="checkbox"/> Master	univerzální program
<input type="checkbox"/> Hudba	pro poslech hudby
<input type="checkbox"/> TV	pro poslech TV
<input type="checkbox"/> Komfort	potlačí okolní šum
<input type="checkbox"/> Zvuk zezadu	zvýrazňuje zvuky přicházející zezadu
<input type="checkbox"/> Rozšíření slyšitelnosti	zajišťuje slyšitelnost vysokofrekvenčních zvuků
<input type="checkbox"/> Telefon	pro poslech telefonu
<input type="checkbox"/> T	v tomto programu je příjem zvuku zajištěn pomocí telefonní cívky (T), nikoliv mikrofonom sluchadla (M). Telefonní cívka se používá tam, kde je nainstalován systém indukční smyčky. Zapnete-li program telefonní cívky, uslyšíte konkrétní zdroj zvuku bez okolních zvuků.
<input type="checkbox"/> M+T	v tomto programu se pro příjem zvuku používá mikrofon sluchadla (M) a telefonní cívka (T).
<input type="checkbox"/> Zen	přehrává náhodně zvolené harmonické tóny. Obsahuje pouze jeden styl.

Kombinované programy	program Master v jednom sluchadle a program Zen, Zvuk zezadu, Rozšíření slyšitelnosti, T, MT nebo Telefon ve druhém sluchadle
<input type="checkbox"/> _____	
<input type="checkbox"/> _____	
<input type="checkbox"/> _____	
<input type="checkbox"/> _____	
<input type="checkbox"/> Zen+	speciální program Zen, který nabízí až tři různé styly Zen
<input type="checkbox"/> Telefon+	poslech telefonního hovoru dvěma sluchadly. Telefonní hovor je snímán jedním ze sluchadel a bezdrátově přenášen do druhého. Poznámka: ve sluchadle, do kterého je hovor přenášen, je vypnut mikrofon.

Pokud budete potřebovat po čase změnu, je možné kombinaci poslechových programů změnit.

Program Zen je možné používat společně se zesílením zvuku, takže budou slyšitelné okolní zvuky současně s tóny Zen. Případně jej lze používat samostatně (bez funkce zesílení zvuku), pokud nechcete slyšet okolní zvuky.

Dobu, po kterou bude sluchadlo přehrávat tóny Zen, může nastavit Váš lékař podle Vašich požadavků.

Výhody

Program Zen může některým lidem vyhovovat jako relaxační zvukový program. Pokud je program Zen použit v rámci terapie tinitu (ušních šelestů), může uživatel pocítit úlevu od tinitu.



UPOZORNĚNÍ

Používání jednotlivých programů Zen může omezovat poslech okolních zvuků včetně řeči. Tyto programy by neměly být používány v případech, kdy je důležité slyšet okolní zvuky. V takových situacích přepněte sluchadlo na některý jiný program, než je program Zen.



UPOZORNĚNÍ

Pokud pocítíte pokles hlasitosti, snášenlivosti zvuků, méně čistý zvuk řeči nebo zhoršení tinitu, kontaktujte Vašeho sluchadlového odborníka.



UPOZORNĚNÍ

Pokud máte zvolen poslechový program Telefon+, nepamenejte, že jsou situace, ve kterých je obzvlášť důležité slyšet okolní zvuky.

Přepínání poslechových programů

Při každé změně programu se ozve zvukový signál, pokud tato funkce nebyla vypnuta.

Program 1: Zpráva nebo jedno krátké pípnutí

Program 2: Zpráva nebo dvě krátká pípnutí

Program 3: Zpráva nebo tři krátká pípnutí

Program 4: Zpráva nebo jedno dlouhé a jedno krátké pípnutí

Zen+: Zpráva nebo tón

Telefon+: Zpráva nebo tón

Pokud používáte dvě sluchadla, projeví se každá změna programu u obou Vašich sluchadel.

Zen+

Pro aktivaci tohoto programu dlouze (2 s) stiskněte tlačítko programů na sluchadle nebo na dálkovém ovladači RC-DEX. Krátkým stisknutím tlačítka pak můžete přepínat jednotlivé styly Zen.


Program Zen+ opustíte stisknutím tlačítka programů po dobu dvou sekund.

Telefon+

Tento program může být nastaven pokud dlouze (2 s) stisknete tlačítko pro přepínání programů na tom z obou sluchadel, ke kterému budete přikládat telefon.

Program Telefon+ opustíte stisknutím stejného tlačítka programů po dobu dvou sekund.

Chcete-li deaktivovat tlačítko volby programů, obraťte se na svého lékaře.

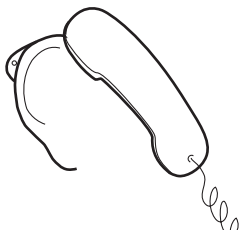


Telefonování

Při telefonování doporučujeme držet telefon u hlavy mírně nad uchem v určitém úhlu, ne přímo na uchu. Pokud není zvuk optimální, pokuste se mírně posunout telefonní sluchátko do jiné polohy.

Nasazení sluchadla

Uchopte sluchadlo za spodní část hadičky a zasuňte koncovku do zvukovodu. Pomoci si můžete, pokud druhou rukou zatáhnete boltec dozadu a nahoru.

Vložte sluchadlo za ušní boltec tak, aby sluchadlo a hadička spočívala pohodlně na uchu těsně u hlavy.

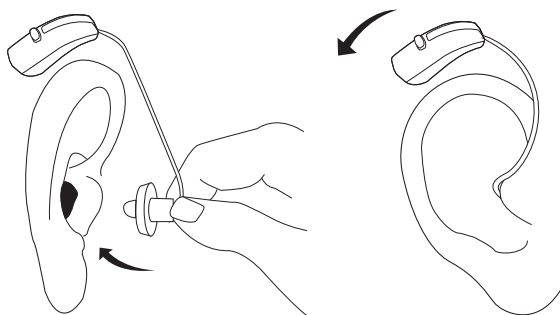


Na obrázku vidíte otevřenou ušní koncovku. Další informace o různých typech ušních koncovek a tvarovek, kotvičkách naleznete v samostatné brožurce.

Sundání sluchadla

Vyjměte sluchadlo zpoza ucha.


Opatrně vytáhněte reproduktorek ze zvukovodu za spodní část hadičky. Pokud má koncovka vytahovací strunku, vytáhněte opatrně koncovku pomocí strunky ze zvukovodu.

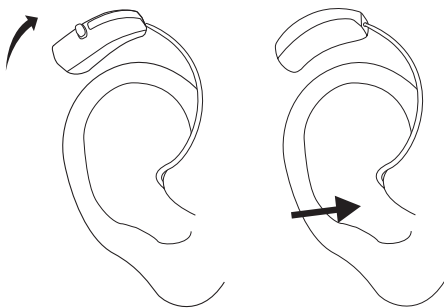

Čištění


Pro čištění sluchadla a ušní sady máte k dispozici následující pomůcky*.

1. Hadřík
2. Dlouhý nástroj na odstraňování ušního mazu
3. Krátký nástroj na odstraňování ušního mazu
4. Kartáček

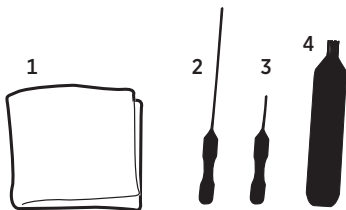

Další příslušenství k čištění sluchadel je k dispozici u Vašeho lékaře.

* Výběr je dán typem ušní sady

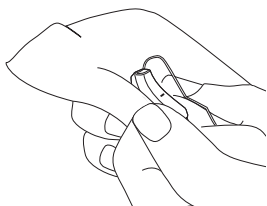


Po použití sluchadlo očistěte měkkým hadříkem.



VAROVÁNÍ

K čištění sluchadla nikdy nepoužívejte vodu nebo čisticí roztok, může dojít k poškození sluchadla.

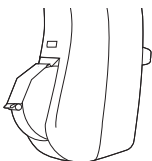

Pokud sluchadlo nepoužíváte, nechte pouzdro baterie otevřené, aby bylo zajištěno větrání a vyschnutí sluchadla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro Vaše sluchadlo je k dispozici celá řada doplňkových zařízení.

- RC-DEX
- TV-DEX
- M-DEX

Chcete-li zjistit, zda by pro Vás bylo používání dálkového ovladače nebo jiného příslušenství výhodné, obraťte se prosím na svého lékaře.

PROBLÉMY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Následující stránky obsahují rady, jak postupovat, pokud sluchadlo přestane fungovat nebo pokud pracuje neuspokojivě. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Vašeho lékaře nebo značkový servis Widex.

Problém	Možná příčina	Řešení
Sluchadlo je úplně tiché	Sluchadlo není zapnuto	Ujistěte se, že je bateriové pouzdro uzavřeno
	Hadička EarWire je poškozena	Obraťte se na svého lékaře
	Baterie je nefunkční nebo vybitá	Vložte do sluchadla novou baterii
	Filtr proti mazu je zanesený	Vyměňte filtr proti mazu. Prostudujte si samostatný návod k ušní sadě.
Sluchadlo není dostatečně hlasité	Baterie je téměř vybitá	Vložte do sluchadla novou baterii
	Filtr proti mazu je zanesený	Vyměňte filtr proti mazu. Prostudujte si samostatný návod k ušní sadě.
	Vaše ucho může blokovat ušní maz	Navštivte ušního lékaře
	Váš sluch se mohl změnit	Obraťte se na svého lékaře

Problém	Možná příčina	Řešení
Ze sluchadla se ozývá nepřetržitě pískání	Vaše ucho může blokovat ušní maz	Navštivte ušního lékaře
	Hadička EarWire je zažloutlá a tuhá	Obraťte se na svého lékaře
	Ušní koncovka/ tvarovka není správně umístěna ve zvukovodu	Vyjměte koncovku/ tvarovku a znovu ji vložte do zvukovodu
	Ušní koncovka je příliš volná	Obraťte se na svého lékaře
	Reproduktorek není správně upevněn v koncovce/tvarovce	Tovární koncovka: Koncovku vyměňte. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na svého lékaře Individuální koncovka / tvarovka: Obraťte se na svého lékaře
Vaše dvě sluchadla nepracují synchronně	Došlo ke ztrátě spojení mezi sluchadly.	Sluchadla vypněte a znovu zapněte.

Problém	Možná příčina	Řešení
<p>Sluchadla nereagují na stisknutí tlačítka pro změnu hlasitosti nebo programu na ovladači RC-DEX</p>	<p>a. RC-DEX je používán za hranicí svého dosahu (> 1 m) b. V blízkosti se nachází silné elektromagnetické pole c. RC-DEX a sluchadla CLEAR nejsou spárovány</p>	<p>a. Přibližte RC-DEX blíže ke sluchadlům CLEAR b. Opusťte místo se známým zdrojem EM rušení c. Požádejte Vašeho lékaře o kontrolu, zda je RC-DEX spárován se sluchadly CLEAR</p>
<p>Ve sluchadlech je slyšet „přerušovaná“ řeč nebo není slyšet nic při přenosu z druhého sluchadla.</p>	<p>a. Slabá baterie v jednom ze sluchadel b. V blízkosti se nachází silné elektromagnetické pole</p>	<p>a. Vyměňte baterii v jednom nebo v obou sluchadlech b. Opusťte místo se známým zdrojem rušení</p>

PÉČE O VAŠE SLUCHADLO

Sluchadlo je hodnotný předmět, a mělo by se s ním proto zacházet s náležitou péčí. Zde je několik zásad, které prodlouží životnost vašeho sluchadla:



UPOZORNĚNÍ

- Pokud sluchadlo nepoužíváte, vypněte jej. Jestliže nebude sluchadlo používáno po dobu několika dní, vyjměte z něj baterii.
- Pokud sluchadlo nepoužíváte, uložte je na suché, bezpečné místo, mimo dosah dětí nebo domácích zvířat.
- Nevystavujte sluchadlo působení extrémních teplot nebo vysoké vlhkosti. Po silném zpotení, které může vzniknout například během intenzivní fyzické zátěže při sportu, nezapomeňte sluchadla důkladně vysušit.
- Chraňte Vaše sluchadla před pádem – při čištění nebo výměně baterie držte sluchadla nad měkkým povrchem.
- Nenoste sluchadlo do sprchy nebo při plavání, při používání vysoušeče vlasů, parfémů či sprejů na vlasy.
- V prostředí s vysokou vlhkostí doporučujeme denně používat vysoušecí soupravu Widex pro snížení vlhkosti ve sluchadle. Prostudujte si instrukce přibalené k odvlhčovací sadě Widex.

VAROVÁNÍ



VAROVÁNÍ

Sluchadla nebo baterie mohou být nebezpečné, pokud dojde k jejich polknutí nebo nesprávnému použití. Nesprávné použití nebo polknutí může být příčinou vážného poranění, nebo dokonce úmrtí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékaře.

- Sluchadla a jejich součásti, příslušenství a baterie uchovávejte mimo dosah dětí a dalších osob, které by je mohly polknout nebo se jimi jinak poranit. Výměnu baterií neprovádějte před nimi a zamezte tomu, aby viděli, kde máte uloženy náhradní baterie. S použitými bateriemi nakládejte řádně a důsledně.
- Baterie jsou velmi malé a lze je snadno zaměnit za tablety nebo léky. Nikdy a za žádných okolností nevkládejte baterii nebo sluchadlo do úst, protože hrozí nebezpečí spolknutí.



VAROVÁNÍ

- Pokud je baterie nahrazena nesprávným typem nebo nabíjena, hrozí nebezpečí výbuchu. Likvidaci použitých baterií provádějte podle platných předpisů.
- Nikdy nedovolte jiné osobě používat Vaše sluchadlo, neboť by to mohlo způsobit trvalé poškození sluchu dotyčné osoby.
- Při volbě poslechového programu mějte na paměti, že jsou situace, při kterých je velmi důležité slyšet okolní zvuky (např. dopravní provoz, varovné signály).
- Sluchadla Widex jsou vyrobena z moderních nealergizujících materiálů. Přesto se ve výjimečných případech může objevit podráždění kůže. Pokud zjistíte na uchu, ve zvukovodu, nebo v jeho okolí podrážděnou pokožku, vyhledejte Vašeho lékaře.



VAROVÁNÍ

- Uvědomte si prosím, že používání jakéhokoli typu sluchadla může poněkud zvýšit riziko infekce ve zvukovodu. Infekce může vzniknout horším odvětráním zvukovodu, nebo jeho poškrábáním sluchadlem. Doporučujeme proto sluchadlo a ušní sadu na noc vyjímát z ucha, aby se zvukovod provětral. Nezapomeňte sluchadlo a ušní sadu pravidelně čistit a kontrolovat podle návodu. Pokud se infekce ve zvukovodu projeví, je dobré vyčistit opatrně sluchadlo dezinfekčním nebo podobným roztokem. Za žádných okolností nepoužívejte k čištění sluchadel a ušních tvarovek líh, chlor nebo podobné látky.
- Sluchadla Widex nejsou schválena pro používání v dolech a jiných prostorech s výbušnými plyny.



VAROVÁNÍ

- Sluchadlo si vždy odložte před rentgenologickým vyšetřením, vyšetřením magnetické rezonance nebo CT vyšetřením, snímkováním nebo ozařováním. Záření vznikající během těchto procedur, stejně jako ostatní zdroje záření, jako je například mikrovlnná trouba, mohou Vaše sluchadlo poškodit. Záření například ze sledovacích zařízení, poplašných zařízení nebo mobilních telefonů je slabší a pro Vaše sluchadlo není nebezpečné.



UPOZORNĚNÍ

- Vaše sluchadlo bylo testováno na elektromagnetické rušení podle mezinárodních norem. I přesto, se rušení u sluchadla může nepředvídatelně vyskytnout v důsledku elektromagnetického vyzařování jiných výrobků, jako jsou např. poplašné nebo sledovací systémy a mobilní telefony.
- Ačkoli Vaše sluchadlo bylo navrženo tak, aby vyhovovalo i těm nejpřísnějším mezinárodním normám týkajícím se elektromagnetické kompatibility, nelze vyloučit možnost vzájemného rušení s jinými zařízeními, jako jsou například některé lékařské přístroje.
- Nikdy se nesnažte rozebírat nebo opravovat sluchadlo sami.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ SLUCHADEL

POZNÁMKA

- Vaše sluchadlo Vám nikdy zcela nenahradí ztracený sluch, ale pomůže Vám mnohem lépe slyšet a rozumět co říkají ostatní lidé kolem Vás – a vrátí Vám mnoho již zapomenutých zvuků. Samozřejmě přivyknání na nové sluchadlo a nové zvuky bude vyžadovat určitý čas.
- Budete-li používat Vaše sluchadla málo a nepravidelně, nemusí Vám přinést ve většině případů takový prospěch, jako při pravidelném používání.
- Používání sluchadel je pouze jednou částí rehabilitace Vašeho sluchu a mělo by být doplňováno poslechovým tréninkem včetně odezírání ze rtů.
- Používáním sluchadel se zvyšuje riziko hromadění ušního mazu. Pokud máte podezření na ucpání ucha ušním mazem, kontaktujte svého lékaře/ORL lékaře. Ušní maz může způsobit nejenom zhoršení vlastního sluchu, ale i značné zhoršení poslechu ze sluchadla. Proto doporučujeme, abyste svého lékaře několikrát ročně požádali o vyčištění uší.

REGULATORY INFORMATION

Federal Communications Commission and Industry Canada Statement

FCC ID: TTY-C4FS

IC: 5676B-C4FS

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by

turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with the Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment as per IC RSS-102.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.

CE 0459

Společnost Widex A/S tímto prohlašuje, že C3-FS vyhovuje základním požadavkům a ostatním odpovídajícím ustanovením Směrnice 1999/5/EC.

Kopie Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:
<http://www.widex.com>

 **N26346**



Sluchadla, příslušenství a baterie se nesmí vyhazovat do běžného komunálního odpadu. Pro radu, jak správně likvidovat Vaše sluchadla a baterie, se obraťte na distributora sluchadel Widex.

WIDEX Line Praha
Bohušovická 230/19
190 00 Praha 9
Tel: 286 580 396
servis@widex.cz

WIDEX Line Brno
Zelný trh 293/10
602 00 Brno
Tel: 543 331 630
brno@widex.cz

www.widex.cz

CE 0459

Výrobce
WIDEX A/S • Nymoellevvej 6, DK-3540 Lyngø
Denmark • www.widex.com



Printed by HTO / 2011-06
9 514 0177 020 #01