

widex  Flash™
easy listening

Návod k použití Flash

FL-9 / FL-9é
Závěsné sluchadlo

WIDEX®
high definition hearing

Tento návod k použití popisuje dva modely sluchadla: **FL-9 a FL-9é.**

Není-li uvedeno jinak, platí všechny informace pro oba modely. Tam kde je uvedeno, že se informace týkají pouze modelu FL-9 nebo FL-9é se ujistěte, že čtete informace týkající se Vašeho sluchadla.

Sluchadlo, tvarovka, é-tip a příslušenství nemusí vypadat zcela shodně jako to Vaše. Vyrazujeme si právo provádět určité změny podle potřeby.



Sluchadla a jejich příslušenství včetně baterií by se neměla vyhazovat do běžného domácího odpadu. Pro radu, jak správně likvidovat Vaše sluchadla a baterie, se prosím obraťte na Vašeho distributora sluchadel Widex.

Obsah

Vaše nové sluchadlo Flash	4
Flash (FL-9)	5
Flash élan (FL-9é)	6
Ušní sada élan ear-set	7
Baterie	8
Typ baterie	8
Vložení baterie	9
Výměna baterie	10
Vypínání a zapínání sluchadla	11
Rozlišení pravého a levého sluchadla	12
Vkládání sluchadla Flash (FL-9) do ucha	13
Vkládání sluchadla Flash élan (FL-9é) do ucha	15
Vyjímání sluchadla Flash	17
Automatické nastavení hlasitosti	18
Jemné doladění hlasitosti	19
Poslechové programy	20
Přepínání programů	22
Čištění sluchadla Flash (FL-9)	25
Příslušenství pro čištění	25
Sluchadlo	26
Ušní koncovka	26
Čištění sluchadla Flash élan (FL-9é)	28
Příslušenství pro čištění	28
Sluchadlo	29
Čištění sady élan ear-set	29
Výměna sady Flash élan (FL-9é) ear-set	32
Individuální sada élan ear-set	33
Péče o Vaše sluchadlo	37
Zvláštní péče o sluchadlo Flash élan (FL-9é)	39
Několik dobrých rad	41
Příslušenství	43
Audio vstup	43
FM systémy	46
Problémy a jejich odstranění Flash (FL-9)	47
Problémy a jejich odstranění Flash élan (FL-9é)	50

Vaše nové sluchadlo Flash


Děkujeme Vám, že jste si vybrali sluchadlo Widex. Flash je sluchadlo, které Vám umožní stát se součástí procesu, při kterém se zvuk přizpůsobí Vaší individuální nedoslýchavosti a osobním požadavkům.

Aby Vám Vaše nové sluchadlo Flash přineslo co největší užitek, doporučujeme Vám přečíst si pozorně celý tento návod.

Doufáme, že budete s novým sluchadlem Widex spokojeni.


Flash (FL-9)

1. **Otvor mikrofonu**, kudy přichází zvuk do sluchadla.
2. **Regulátor hlasitosti** umožňující jemně doladit automaticky nastavenou hlasitost.
3. **Přepínač programů**, který umožňuje výběr mezi různými poslechovými programy.
4. **Vypínač**.
5. **Zásuvka pro baterii** s výstupkem pro nehet pro snazší otevírání.
6. **Hák sluchadla**.
7. **Plastová trubička**.
8. **Ušní koncovka**.
9. **Zvukový výstup**.
10. **Větrací trubička** pro odvětrávání zvukovodu.

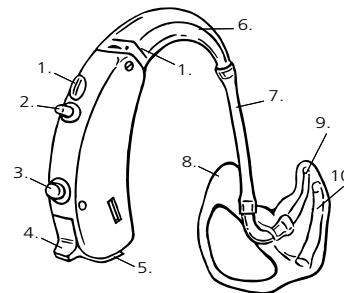


Flash élan (FL-9é)

1. **Otvor mikrofону**, kudy prichází zvuk do sluchadla.
2. **Regulátor hlasitosti** umožňující jemně doladit automaticky nastavenou hlasitost.
3. **Přepínač programů**, který umožňuje výběr mezi různými poslechovými programy.
4. **Vypínač**.
5. **Zásuvka pro baterii** s výstupkem pro nehet pro snazší otevírání.
6. **élan ear-set**.

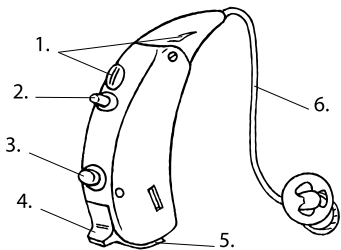

Ušní sada élan ear-set

1. Háč
2. Trubička
3. Kotva
4. Koncovka é-tip

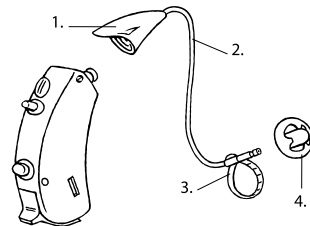

Baterie

Typ baterie



Doporučený typ baterie pro Vaše sluchadlo Flash je:

Zinc Air baterie typ 13

Možnost zakoupení vhodných baterií konzultujte s Vaším sluchadlovým odborníkem. Povězte si prosím data uvedeného na balení baterií, které udává jejich životnost. Nepoužívejte baterie s prošlým datem. Protože jde o Zinc Air (zinek vzduch) baterie, potřebují ke své funkci vzduch. Neodstraňujte proto nálepku z baterie dřív, než ji budete vkládat do sluchadla. Jakmile je jedna nálepka odstraněna, začne baterie po několika vteřinách pracovat. Životnost baterií závisí na mnoha faktorech, jako například na nastavení a denní době používání sluchadel, na zvukovém prostředí, ve kterém se uživatel se sluchadly nejčastěji pohybuje.




Vložení baterie

Před vložení nové baterie do sluchadla nezapomeňte z baterie odstranit nálepku. Nepoužívejte baterie, na kterých jsou lepkavé zbytky, protože mohou ucpat vzduchové otvory baterie.

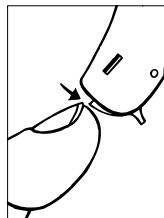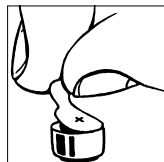

Zatlačte výstupek pro nehet nahoru a vyklopte zásuvku pro baterii. Výstupek pro nehet je na spodní straně vypínače v dolní části sluchadla.

Znaménko plus (+) na baterii musí být nahoře. Pokud zásuvku pro baterii nelze zavřít lehce, je baterie vložena nesprávně.

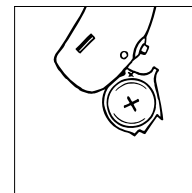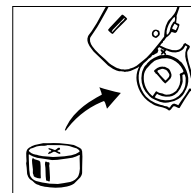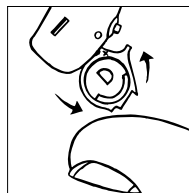


Výměna baterie

Když zaslechnete ze sluchadla čtyři rychlé tóny, znamená to, že baterie je téměř vybitá a měli byste ji co nejdříve vyměnit. Jak dlouho bude ještě sluchadlo po zaznění těchto tónů pracovat, záleží případ od případu. Doporučujeme nosit u sebe vždy náhradní baterii. Pokud je baterie vybitá úplně, sluchadlo zcela ztichne.

Pokud chcete změnit hlasitost signalizace vybité baterie, nebo tuto funkci vypnout, obraťte se na Vašeho sluchadlového odborníka.


Nikdy nenechávejte vybitou baterii ve sluchadle. Pokud by vybitá baterie trochu vytékala, mohla by poškodit sluchadlo. Výměnu baterie provádějte nejlépe nad stolem, nebo v místnosti s kobercem, baterie se jinak může zakutálet.

Vypínání a zapínání sluchadla

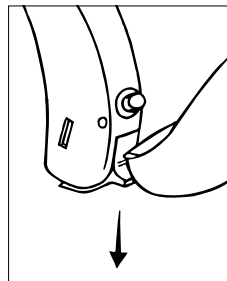

Zásuvka pro baterii je v dolní části sluchadla. Zásuvka slouží zároveň jako vypínač.


Sluchadlo zapnete zatlačením vypínače nahoru a vypnete zatlačením vypínače směrem dolů.

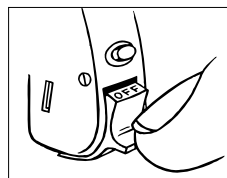

Když je sluchadlo vypnuté, je na vypínači jasně viditelný nápis „OFF“.

Nezapomeňte prosím vypnout sluchadlo, když ho nepoužíváte. Pokud nebudete sluchadlo opět brzy užívat, vyjměte z něj baterii.



Rozlišení pravého a levého sluchadla

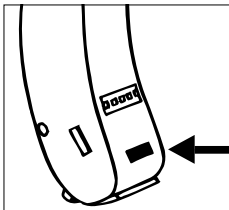


Nosíte-li sluchadla na obou uších a chcete-li mít jistotu, že je nasazujete na správné ucho, můžete požádat svého sluchadlového odborníka, aby Vám sluchadla odlišil malou identifikační značkou (červená značka = vpravo a modrá značka = vlevo).

Vkládání sluchadla Flash (FL-9) do ucha

Vložte baterii do sluchadla. Nejprve do ucha zasuňte ušní koncovku, držte ji přitom za dolní část trubičky. Pro snadnější vkládání si můžete pomoci druhou rukou potahováním za ušní boltec nahoru a dozadu.

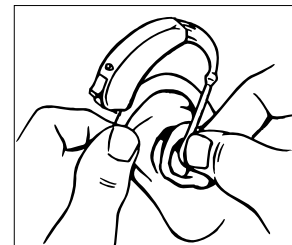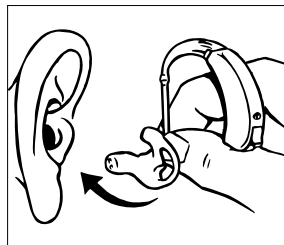


Po usazení koncovky do ucha zasuňte vlastní sluchadlo za ušní boltec tak, aby hák sluchadla spočíval pohodlně na uchu těsně u hlavy.

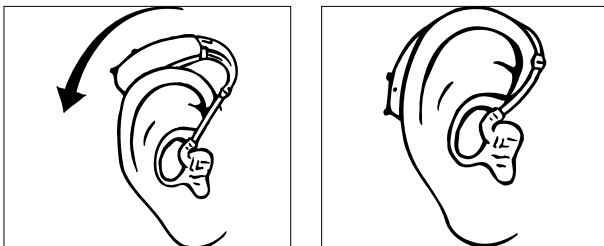

Vkládání sluchadla Flash élan (FL-9é) do ucha

Vložte baterii do sluchadla. Nejprve zasuňte za ušní boltec sluchadlo tak, aby hák s trubičkou komfortně dosedly na boltec, blízko Vaší hlavy. Potom vložte do zvukovodu koncovku é-tip, kterou držíte za spodní část trubičky. Nakonec umístěte kotvu. Měla by být umístěna u výstupu zvukovodu a zajišťovat jak koncovku é-tip, tak celou sadu včetně trubičky. Nezapomeňte v pravidelných intervalech kontrolovat správné usazení sluchadla a ušní sady ear-set.

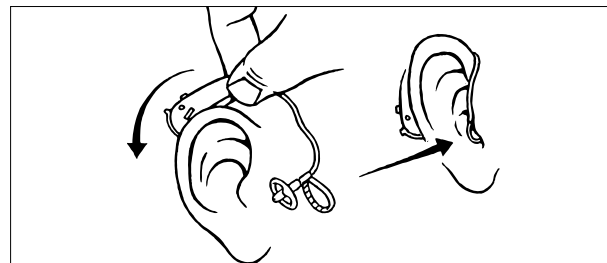

Stav sluchadla po jeho zapnutí

Vaše sluchadlo se po zapnutí může nastavit do jednoho ze dvou režimů. V běžném nastavení může sluchadlo při vkládání ušní tvarovky nebo koncovky é-tip do ucha slabě pískat. Druhé možné nastavení zajistí, že při vkládání ušní tvarovky nebo koncovky é-tip do ucha je pískání sluchadla potlačeno. Společně se svým sluchadlovým odborníkem můžete vybrat takový režim nastavení sluchadla po zapnutí, který bude nejlépe vyhovovat Vaším potřebám.

Vyjímání sluchadla Flash


Před vyjmutím sluchadlo vypněte. Nejprve vyndejte sluchadlo zpoza ucha. Opatrně vytáhněte ušní koncovku/é-tip z ucha za spodní část trubičky. Pokud to jde obtížně, můžete si pomoci opatrným pohybováním koncovky/é-tipu ze strany na stranu a zároveň ji táhněte ven z ucha. Pomoci si můžete také druhou rukou lehkým tahem za boltec nahoru a dozadu.

Automatické nastavení hlasitosti

Flash si nastavuje hlasitost automaticky podle Vašeho zvukového prostředí. Sluchadlo Flash provádí několik tisíckrát za vteřinu analýzu okolí a podle toho přesně nastavuje zvuk. Máte-li Flash, nemusíte vůbec myslet na nastavení hlasitosti – děje se to zcela automaticky.

Důležité: Pokud je hlasitost Vašeho sluchadla příliš silná nebo příliš slabá, pokud jsou reprodukovány zvuky zkreslené, nebo potřebujete nějaké další informace, obraťte se na svého sluchadlového odborníka, u něhož jste obdrželi sluchadlo.

Jemné doladění hlasitosti

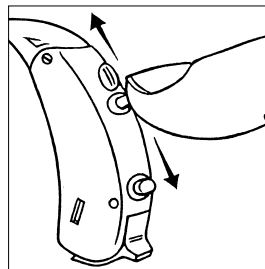

Vaše sluchadlo může být vybaveno regulátorem hlasitosti, kterým můžete jemně doladit automaticky nastavenou hlasitost. Pro automatické zvyšování hlasitosti tiskněte páčku směrem nahoru. Pro snižování hlasitosti tiskněte páčku

směrem dolů. Pro malé změny hlasitosti tiskněte páčku velmi krátce. Pro rychlejší změnu hlasitosti tiskněte páčku delší dobu, několik sekund.

Při jakékoliv manipulaci s regulátorem hlasitosti uslyšíte pípnutí. Pokud potřebujete upravit hlasitost pípnutí, vypnout tuto funkci nebo odpojit regulátor hlasitosti, obraťte se laskavě na Vašeho sluchadlového odborníka.

Ruční doladění automatického nastavení hlasitosti se zruší při vypnutí sluchadla.

Poslechové programy

Vaše sluchadlo Flash může mít až čtyři poslechové programy pro různé poslechové situace. Váš sluchadlový odborník Vám pomůže vybrat si programy, které jsou pro Vás užitečné, a zpřístupní je pomocí přepínače programů. Pokud budete potřebovat po čase změnu, je možné kombinaci poslechových programů změnit. V tomto návodu jsou programy, které Vám sluchadlový odborník může zařadit do sluchadla a umožnit přepínat (viz strana 24). Můžete si vybrat z následujících programů:

Flash Master: Tento poslechový program je běžným programem sluchadla Flash. V Master programu pracují všechny automatické funkce sluchadla tak, aby optimalizovaly slyšitelnost, srozumitelnost řeči a komfort ve všech poslechových situacích.


Přivykání: Tento poslechový program má stejný rys jako Master program, je nastaveno pouze menší zesílení. Tento poslechový program je ideální, pokud je Flash Vaším prvním sluchadlem a chcete si na všechny nové zvuky zvykat postupně.

Hudba: Tento poslechový program je ideální pro poslech hudby.

TV: Tento poslechový program je vhodný pro poslech televizoru.

M+T: V tomto poslechovém programu posloucháte pomocí mikrofonu sluchadla (M) a telefonní (indukční) cívkou (T). Tento poslechový program Vám umožní poslouchat zvuk z indukční smyčky a přitom slyšet okolní zvuky.

T: V tomto poslechovém programu posloucháte pouze pomocí telefonní (indukční) cívkou (T), ne přes mikrofon sluchadla. Telefonní cívka může být používána pouze tam, kde je instalována indukční smyčka. Zapnutím tohoto programu můžete poslouchat specifické zdroje zvuku z indukční smyčky a vyloučit okolní zvuky.

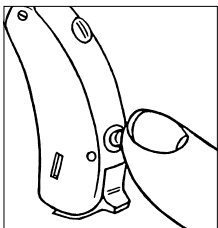

Přepínání programů

Jednotlivé programy můžete přepínat pomocí přepínače, který je na zadní straně sluchadla. Pokud nechcete používat přepínač programů, požádejte Vašeho sluchadlového odborníka o odpojení přepínače.

Pokaždé, když přepnete na jiný program, uslyšíte pípnutí. Pípnutí Vám napovídají, který program máte zvolen:

- Program 1: jedno krátké pípnutí
- Program 2: dvě krátká pípnutí
- Program 3: tři krátká pípnutí
- Program 4: jedno dlouhé a jedno krátké pípnutí

Počet různých pípnutí závisí na tom, kolik programů jste si nechali ve spolupráci s Vaším sluchadlovým odborníkem ve Vašem sluchadle nastavit. Zvolené poslechové programy jsou očíslovány od 1 do 4.

Pokud se později po konzultaci se svým sluchadlovým odborníkem rozhodnete pro jinou kombinaci programů, můžete si je zapsat do prázdných formulářů, které jsou na konci tohoto návodu.

Poslechové programy


Program	Zvolené programy:	Použití:
1.		
2.		
3.		
4.		

Čištění sluchadla Flash (FL-9)


Příslušenství pro čištění

Pro Vaše sluchadlo jsou k dispozici následující prostředky pro čištění:

1. **Magnet na baterii** pro snadnější vkládání baterie do bateriového pouzdra.
2. **Přípravek na čištění** větracího kanálku a zvukového výstupu tvarovky.
3. **Jemný hadřík** pro sušení a čištění sluchadel.

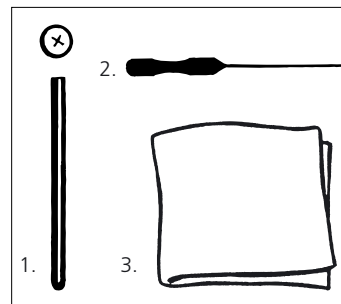


Další příslušenství je k dispozici u Vašeho sluchadlového odborníka, kde jste sluchadlo získali.

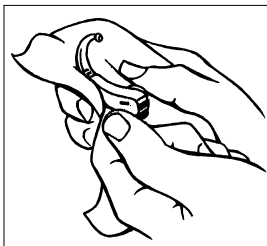

Sluchadlo

Nikdy nemyjte sluchadlo vodou, čistícími roztoky nebo jinými tekutinami. Místo toho očistěte své sluchadlo po používání měkkým suchým hadříkem.

Pokud sluchadlo nepoužíváte, je vhodné ponechat otevřenou zásuvku na baterii, aby sluchadlo mohlo vyschnout.

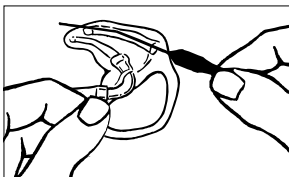


Ušní koncovka

Presvědčte se, že ušní koncovka je čistá a není na ní nebo v ní ušní maz nebo vlhkost. Pokud je ucpaná, vyčistěte otvor nástrojem na odstranění ušního mazu.



Odpojte plastovou trubičku z háku sluchadla nejméně jedenkrát týdně a umyjte koncovku s trubičkou ve vlažné vodě. Propláchněte koncovku skrz a nechte ji přes noc uschnout.

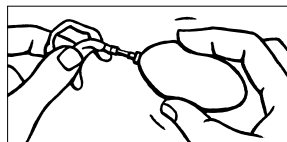

Pokud je i příští den v koncovce nebo trubičce vlhkost, vysušte ji profouknutím pomocí malého balónku. *Nikdy* nepoužívejte k čištění koncovky líh nebo jiné čistící roztoky.


Pokud trubička koncovky začne tuhnut, tvrdnout nebo prskat či žloutnout, nechte si ji vyměnit. Poradte se s Vaším sluchadlovým odborníkem.

Čištění sluchadla Flash élan (FL-9é)


Příslušenství pro čištění

Pro Vaše sluchadlo jsou k dispozici následující prostředky pro čištění:

1. **Magnet na baterii** pro snadnější vkládání baterie do bateriového pouzdra.
2. **Strunka na čištění** sady élan ear-set.
3. **Jemný hadřík** pro sušení a čištění sluchadel.

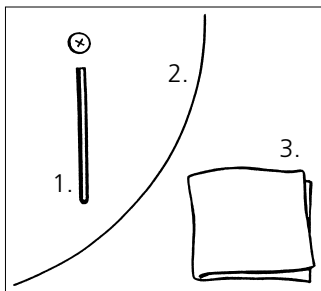

Další příslušenství je k dispozici u Vašeho sluchadlového odborníka, kde jste sluchadlo získali.

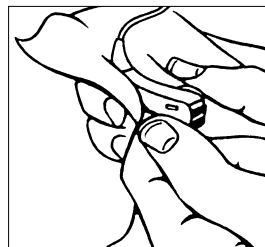



Sluchadlo

Nikdy nemyjte sluchadlo vodou, čisticími roztoky nebo jinými tekutinami. Místo toho očistěte své sluchadlo po používání měkkým suchým hadříkem.



Pokud sluchadlo nepoužíváte, je vhodné ponechat otevřenou zásuvku na baterii, aby sluchadlo mohlo vyschnout.

Čištění sady élan ear-set

Kontrolujte pečlivě, zdali je Vaše ušní sada élan ear-set čistá a bez vlhkosti. *Nikdy* nepoužívejte k čištění élan ear-setu alkohol ani jiné čisticí přípravky. Pokud je nějaká část sady élan ear-set uvolněná, ztvrdlá, zažloutlá nebo poškrábaná, vyměňte celou sadu élan ear-set. Jak získat nové sady élan ear-set Vám poradí Váš sluchadlový odborník.

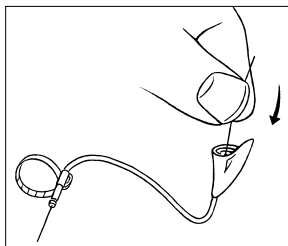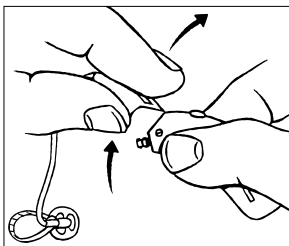

Pokud je trubička élan ear-setu ucpána, je nutno ji vyčistit. Dvěma prsty jedné ruky držte hák a sluchadlo držte druhou rukou. Vyjměte élan ear-set odklopením dozadu. Potom otvor trubičky vyčistíte pomocí strunky.

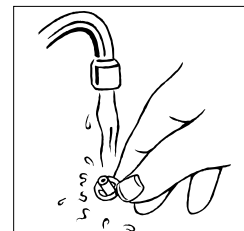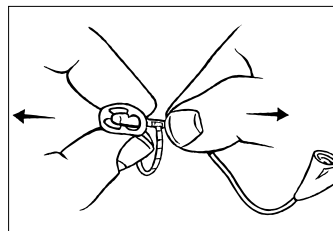


Pokud je třeba, můžete é-tip vyčistit ve vlažné vodě. Odpojte é-tip ze sady a důkladně propláchněte a nechte přes noc vyschnout.

Předtím, než é-tip a ear-set znovu použijete, ujistěte se, že jsou všechny části čisté a suché.

Výměna sady Flash élan (FL-9é) ear-set

Sada élan ear-set by měla být pravidelně vyměňována. Životnost každé sady élan ear-set je individuální a závisí na mnoha faktorech, jako například jak často je sluchadlo používáno, na typu ušního mazu, apod. Sadu élan ear-set vyměníte tak, že dvěma prsty jedné ruky držíte hák a druhou rukou uchopíte sluchadlo. Potom stáhněte ear-set odklopením dozadu. Je důležité sundat hák odklopením dozadu jak je popsáno výše. Novou sadu élan ear-set můžete navlákнуть zpět jemným natlačením na sluchadlo. Je *velmi důležité* ujistit se, že ear-set je na sluchadle pevně nasazen.

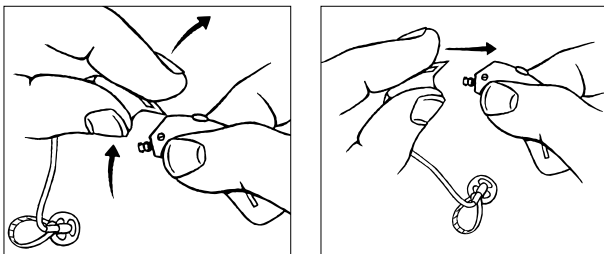



Předtím, než můžete élan ear-set používat, musí být upraven tak, aby přesně vyhovoval Vašemu uchu. Tato úprava může být složitá, pokud nemáte nezbytné zkušenosti nebo vhodné pomůcky. Proto doporučujeme, abyste Vy a Váš sluchadlový odborník společně prošli následující instrukce s ohledem na objednávání jednotlivých částí sady élan ear-set v budoucnu.

Individuální sada élan ear-set


Sada élan ear-set může být sestavena tak, aby přesně seděla ve Vašem uchu. Váš sluchadlový odborník pro Vás vybere správnou velikost koncovky a délku trubičky. Na straně 36 této příručky může Váš sluchadlový odborník zakroužkovat velikosti vhodné pro Vás.

Výběr trubičky: Trubička se dodává v pěti délkách pro pravé a levé ucho zvlášť. Pro komfortní a správné usazení je třeba zvolit správnou délku. Trubička nesmí být nepříjemně krátká ani velmi volná.


Výběr koncovky é-tip: koncovka é-tip se dodává ve čtyřech velikostech. Pro komfortní a správné usazení je třeba zvolit správnou koncovku. Koncovka é-tip musí být umístěna pohodlně ve zvukovodu. Koncovka é-tip se vyjímá povytažením vyčnívající hadičky ear-setu. Potom se na sadu ear-set nasune nová koncovka. Je *velmi důležité* ujistit se, že ear-set je na sluchadle pevně nasazen.

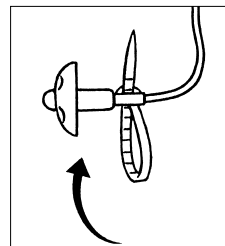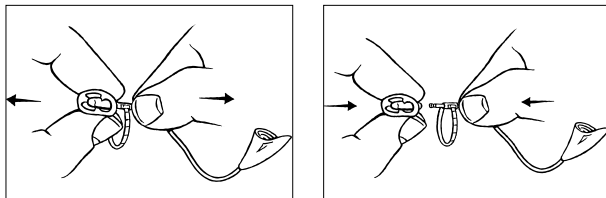

Seřízení kotvy: Kotva by měla vytvořit smyčku vhodné velikosti tak, aby zajistila komfortní zakotvení koncovky é-tip ve zvukovodu. Vytvoří se protažením konce kotvícího pásku malým otvorem po straně sady.

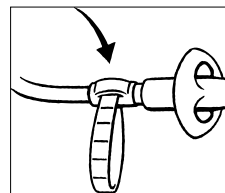

Když má smyčka kotvy správnou délku, přesahující zbytek pásky se odstříhne, takže zůstane pouze smyčka kotvy. Věnujte velkou péči odstranění zbytku pásky tak, aby okraj pásky nepřesahoval okraj malého otvoru a aby zde nebyla žádná ostrá hrana.

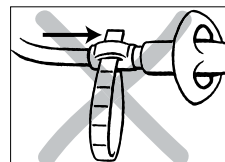

Vyzkoušejte špičkou Vašeho prstu, zda zastřížený okraj není ostrý. Pokud část kotvy přesahuje přes otvor, vytváří nerovnou plochu a může způsobit podráždění ucha.

Kotva se správnou délkou smyčky musí správně zajišťovat koncovku é-tip ve zvukovodu a tím i celou sadu élan ear-set v uchu.



Zakroužkujte vybrané velikosti sady élan ear-set.

Levé ucho		Pravé ucho			
é-tip		Trubička	é-tip		Trubička
1S	1L	1L	1S	1L	1R
2S	2L	2L	2S	2L	2R
		3L			3R
		4L			4R
		5L			5R

Péče o Vaše sluchadlo

Při dobré péči bude Vaše sluchadlo spolehlivě sloužit řadu let. Zde je několik zásad, které prodlouží životnost Vašeho sluchadla:


- Vypínejte sluchadlo, když ho nepoužíváte. Pokud byste ho delší čas nepoužívali vůbec, vyjměte baterii.
- Starejte se o své sluchadlo dle jeho hodnoty, tedy velmi pečlivě. Ukládejte sluchadlo do pouzdra nebo dodané krabičky na suché bezpečné místo, pryč z dosahu dětí nebo domácích zvířat.
- Nikdy sluchadlo nevystavujte extrémním teplotám nebo vysoké vlhkosti.
- V prostředích s vysokou vlhkostí můžete použít odvlhčovací sadu Widex pro snížení vlhkosti ve sluchadle. Prostudujte si instrukce přibalené k odvlhčovací sadě Widex.

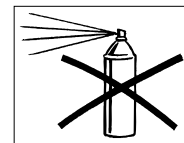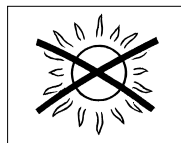

Zvláštní péče o sluchadlo Flash élan (FL-9é)

- Nenoste sluchadlo do sprchy nebo při plavání, při používání vysoušeče vlasů či sprejů na vlasy.
- Nikdy se nesnažte rozebírat nebo opravovat sluchadlo sami.
- Nenoste sluchadlo během rentgenového vyšetření, MR nebo CT vyšetření, léčby diatermií nebo během podobných radiačních léčebných procedur. Sluchadlo nikdy nevkládejte do mikrovlnné trouby. Některé typy záření mohou sluchadlo poškodit. Interference z různých jiných radiových zdrojů (alarmy, poplašné systémy, mobilní telefony) jsou slabé a zaručeně nepoškodí Vaše sluchadlo.
- Sluchadla Widex nejsou schválena pro používání v dolech a jiných prostorech s výbušnými plyny.

- Buďte opatrní při vkládání Vašeho sluchadla Flash élan do pouzdra, aby nedošlo k pokroucení nebo stlačení élan ear-setu a zůstal zachován správný tvar.

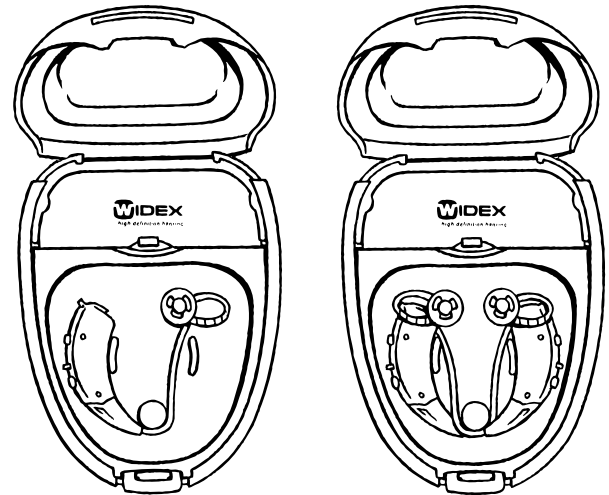

-
- Je důležité důkladně otírat ear-set a é-tip a udržovat je čisté. Jinak může dojít k utržení é-tipu.
 - Pokud je nějaká část sady élan ear-set uvolněná, ztvrdlá, zažloutlá nebo poškrábaná, vyměňte celou sadu élan ear-set. Jak získat nové sady élan ear-set Vám poradí Váš sluchadlový odborník.

Několik dobrých rad

- Používání sluchadla může vést k formování mazové zátky ve Vašem zvukovodu. Pokud máte podezření, že se mazová zátka ve zvukovodu vytvořila, navštivte svého ušního lékaře. Maz může nejenom zhoršit Váš sluch, ale významně i efekt sluchadla. Proto je vhodné požádat svého lékaře několikrát za rok o vyčištění zvukodů.
- Sluchadlo a ostatní příslušenství je třeba chránit před dětmi, které by mohly sluchadlo dávat do úst. Také baterie nepatří dětem do ruky. Použité baterie pečlivě vyhazujte. Baterie raději nikdy nevyměňujte před dětmi, neukazujte jim, kde je máte uložené.
- Nikdy nevkládejte baterie do vlastních úst a nikdy nenechte děti brát baterie do rukou. Pokud dojde k polknutí baterie, navštivte ihned lékaře.

-
- Sluchadla Widex jsou vyrobena z moderních nealergizujících materiálů. Přesto se ve výjimečných případech může objevit podráždění kůže. Pokud zjistíte na uchu, ve zvukovodu, nebo v jeho okolí podrážděnou pokožku, vyhledejte Vašeho sluchadlového odborníka.
 - Uvědomte si prosím, že používání jakéhokoli typu sluchadla, ušní tvarovky nebo koncovky é-tip může poněkud zvýšit riziko infekce ve zvukovodu. Infekce může vzniknout horším odvětráním zvukovodu, nebo jeho poškrábáním sluchadlem nebo tvarovkou. Doporučujeme proto sluchadlo/ušní tvarovku/é-tip na noc vyjímat z ucha, aby se zvukovod provětral. Nezapomeňte sluchadlo/ušní tvarovku/é-tip pravidelně čistit a kontrolovat podle návodu. Pokud se infekce ve zvukovodu projeví, je dobré vyčistit opatrně sluchadlo, ušní tvarovku nebo é-tip dezinfekčním nebo podobným roztokem. Za žádných okolností nepoužívejte k čištění sluchadel a ušních tvarovek alkoholové, chlorované nebo podobné prostředky.

Příslušenství

Audio vstup

Vaše sluchadlo Flash můžete vybavit audio botičkou. Ta umožní přímé propojení k různým druhům příslušenství (FM systém, CROS a BiCROS korekce sluchu), stejně jako k externím audio zařízením (jako je rozhlasový přijímač, televizor, atd.). Tím může být zvuk např. z rozhlasového přijímače nebo od řečníka s FM vysílačem předán přímo do Vašeho sluchadla.

Po připojení audio botičky k Vašemu sluchadlu bude jeden nebo více Vašich běžných poslechových programů nahrazen audio programy.

V tabulce zobrazené níže může Váš sluchadlový odborník zapsat, které audio programy jsou Vám k dispozici a kde jsou umístěny. Jakmile připojíte audio botičku, sluchadlo se automaticky přepne do audio programu (viz strana 44). Pokud chcete potom přepnout na jakýkoliv jiný program, musíte použít tlačítko přepínače programů na sluchadle. Jakmile odpojíte audio botičku, obnoví se obvyklé pořadí programů (viz strana 24).

Program	Program s audio botičkou
1.	
2.	
3.	
4.	

Důležitá poznámka: Pokud je sluchadlo propojeno se zařízením, které je připojeno k elektrické síti, musí toto zařízení splňovat požadavky mezinárodní normy IEC 60065.

Nepřipojujte sluchadlo do zásuvek, které jsou označeny jedním nebo více z následujících symbolů:



Více informací o použití audio vstupu získáte u Vašeho sluchadlového odborníka, kde jste sluchadlo získali.

FM systémy

FM systém je pomocné zařízení, které může být používáno jako příslušenství pro Flash. FM systém zlepšuje srozumitelnost řeči v náročných poslechových situacích. FM systém vyráběný společností Widex se jmenuje SCOLA.

FM systém se skládá z malého rádiového vysílače s mikrofonom, který má u sebe mluvící osoba, a dále z miniaturního přijímače, který se připojuje přímo na sluchadlo Flash prostřednictvím FM botičky. Při použití tohoto systému jste schopni rozumět zcela jasně řeči na vzdálenost 15 metrů i více. Protože je systém bezdrátový, má jak posluchač tak i mluvící plnou volnost pohybu.

Chcete-li získat bližší informace ohledně FM systému, spojte se laskavě se svým sluchadlovým odborníkem.

Problémy a jejich odstranění Flash (FL-9)

Před návštěvou svého sluchadlového odborníka si prosím pečlivě přečtěte tyto rady:

Sluchadlo nehraje:

- *Sluchadlo není zapnuto.* Ujistěte se, že zásuvka pro baterii, která slouží zároveň jako vypínač, je úplně zatlačena nahoru a nápis „OFF“ není na vypínači viditelný.
- *Baterie nepracuje, je vybitá.* Vložte novou baterii. Ujistěte se, že jste baterii vložili do sluchadla správně a zásuvka pro baterii je dobře zavřená. Je možné si zakoupit tester baterií do sluchadel.
- *Zvukový výstup ušní koncovky je ucpaný.* Ušní maz je častou příčinou ucpaní zvukového výstupu v koncovce. Ucpaný výstup vyčistěte.

Zvuk ze sluchadla je příliš slabý:

- *Baterie je téměř vybitá.* Vložte novou baterii. Ujistěte se, že je baterie vložena správně a zásuvka pro baterii je dobře zavřená.
- *Zvukový výstup ušní koncovky je ucpaný.* Ušní maz je častou příčinou ucpaní zvukového výstupu v koncovce. Ucpaný výstup vyčistěte.
- *Vaše ucho může blokovat ušní maz.* Navštivte ušního lékaře a nechte si vyčistit zvukovod.
- *Váš sluch se mohl změnit.* Spojte se se svým sluchadlovým odborníkem.

Sluchadlo píská:

- *Ucho je ucpano ušním mazem.* Navštivte ušního lékaře a nechte si vyčistit zvukovod.
- *Trubička je prasklá.* Nechte si vyměnit trubičku.
- *Trubička je zažloutlá a tuhá.* Nechte si vyměnit trubičku.
- *Trubička se často vytahuje z koncovky nebo háku sluchadla.* Nechte si vyměnit trubičku.
- *Hák sluchadla je prasklý.* Navštivte Vašeho sluchadlového odborníka nebo servis.
- *Ušní tvarovka je v uchu špatně zasunuta.* Tvarovku vyjměte a znovu do ucha vložte. Je důležité, aby ušní tvarovka byla správně zasunuta do zvukovodu.
- *Ušní koncovka už nesedí dobře v uchu.* Navštivte svého sluchadlového odborníka.

Sluchadlo pracuje nepravidelně:

- *Vypínač je špinavý.* Vypínač několikrát přepněte sem a tam.

Problémy a jejich odstranění

Flash élan (FL-9é)

Před návštěvou svého sluchadlového odborníka si prosím pečlivě přečtěte tyto rady:

Sluchadlo nehraje:

- *Sluchadlo není zapnuto.* Ujistěte se, že zásuvka pro baterii, která slouží zároveň jako vypínač, je úplně zatlačena nahoru a nápis „OFF“ není na vypínači viditelný.
- *Baterie nepracuje, je vybitá.* Vložte novou baterii. Ujistěte se, že jste baterii vložili do sluchadla správně a zásuvka pro baterii je dobře zavřená. Je možné si zakoupit tester baterií do sluchadel.
- *Zvukový výstup é-tipu je ucpaný.* Ušní maz je častou příčinou ucpaní zvukového výstupu é-tipu. Ucpaný výstup vyčistěte nebo vyměňte é-tip. Pokud je to nutné, vyměňte celý élan ear-set.

Zvuk ze sluchadla je příliš slabý:

- *Baterie je téměř vybitá.* Vložte novou baterii. Ujistěte se, že je baterie vložena správně a zásuvka pro baterii je dobře zavřená.

- *Zvukový výstup é-tipu je ucpaný.* Ušní maz je častou příčinou ucpaní zvukového výstupu é-tipu. Ucpaný výstup vyčistěte nebo vyměňte é-tip. Pokud je to nutné, vyměňte celý élan ear-set.
- *Vaše ucho může blokovat ušní maz.* Navštivte ušního lékaře a nechte si vyčistit zvukovod.
- *Váš sluch se mohl změnit.* Spojte se se svým sluchadlovým odborníkem.

Sluchadlo píská:

- *Ucho je ucpano ušním mazem.* Navštivte ušního lékaře a nechte si vyčistit zvukovod.
- *Trubička je prasklá.* Vyměňte élan ear-set.
- *Trubička je zažloutlá a tuhá.* Vyměňte élan ear-set.

Sluchadlo pracuje nepravdělně:

- *Vypínač je špinavý.* Vypínač několikrát přepněte sem a tam.

Poslechové programy

Program	Zvolené programy:	Použití:
1.		
2.		
3.		
4.		

Poslechové programy

Program	Zvolené programy:	Použití:
1.		
2.		
3.		
4.		

Poslechové programy

Program	Zvolené programy:	Použití:
1.		
2.		
3.		
4.		

Záruční a pozáruční opravy:

WIDEX SERVIS

Společná 6, 182 00 Praha 8

telefon: 286 580 396,

e-mail: servis@widex.cz



Widex, DK-3500 Vaerloese
Denmark · www.widex.com



Printed by FB / 05-07
9 514 0090 020 #01