



# Návod k použití Inteo

IN-CIC  
Nitroušní sluchadlo

The bottom half of the page features a background image of several large, smooth, grey stones. In the lower right corner, there is a white-bordered inset photograph showing the back and side profile of a man's head, looking towards the right. The Widex logo is positioned in the lower left corner of this section.

**WIDEX**  
*high definition hearing*

---

Vaše sluchadlo a příslušenství nemusí vypadat přesně stejně, jako v tomto návodu na používání. Vyhrazuji si právo provádět určité změny podle potřeby.



Sluchadla a jejich příslušenství včetně baterií by se neměla vyhazovat do běžného domácího odpadu. Pro radu, jak správně likvidovat Vaše sluchadla a baterie, se prosím obraťte na Vašeho distributora sluchadel Widex.

## Obsah

---

Vaše nové Inteo .....	4
Inteo (IN-CIC) .....	6
Baterie .....	8
Typ baterie .....	8
Vložení baterie .....	9
Výměna baterie .....	11
Vypínání a zapínání sluchadla .....	12
Rozeznání levého a pravého sluchadla .....	13
Vkládání Inteo do ucha .....	14
Stav sluchadla po jeho zapnutí .....	15
Vyjímání sluchadla Inteo .....	16
Automatické nastavení hlasitosti .....	17
Jemné doladění hlasitosti .....	18
Poslechové programy .....	19
Přepínání programů .....	23
Čištění sluchadla Inteo .....	24
Příslušenství pro čištění .....	27
Zvukový výstup .....	29
Ventilační otvor, krátký .....	30
Ventilační otvor, průchozí .....	32
Mikrofonní otvor .....	33
Filtr proti mazu CeruSTOP .....	34
Výměna filtru CeruSTOP .....	35
Péče o Vaše sluchadlo .....	38
Několik dobrých rad .....	40
Příslušenství .....	42
Dálkové ovládání .....	42
Problémy a jejich odstranění .....	43

## Vaše nové Inteo

---

Děkujeme Vám, že jste si vybrali sluchadlo Widex. Inteo je sluchadlo, které Vám umožní stát se součástí procesu, při kterém se zvuk přizpůsobí Vaší individuální nedoslýchavosti a osobním požadavkům.

---

Aby Vám Vaše nové Inteo přineslo co největší užitek, doporučujeme Vám přečíst si pozorně celý tento návod.

**Doufáme, že budete s novým sluchadlem Widex spokojeni.**


## Inteo (IN-CIC)

---

1. **Otvor k mikrofону**, kudy přichází zvuk do sluchadla.
2. **Zásuvka pro baterii**, ve které je uložena baterie.
3. **Vypínač**, který slouží zároveň jako víčko bateriového prostoru (viz strana 12).
4. **Zvukový výstup**, kterým prochází zesílený zvuk ze sluchadla do Vašeho ucha.
5. **Výstupek** pro nehet na víčku bateriového prostoru pro snazší otevírání.
6. **Koncovka na vytahování sluchadla**, za kterou se sluchadlo jednoduše vytahuje ze zvukovodu.
7. **Ventilační otvor (krátká ventilace)** pro odvětrání zvukovodu.
8. **Ventilační otvor (průchozí ventilace)** pro odvětrání zvukovodu.

---

Poznámka: Sluchadla Inteo IN-CIC jsou vyráběna s krátkým ventilačním otvorem.

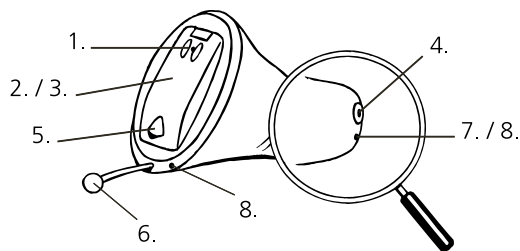

## Baterie


---

### Typ baterie

Doporučený typ baterie pro Vaše Inteo je:


#### Zinc Air baterie typ 10

Možnost zakoupení vhodných baterií konzultujte s Vaším sluchadlovým odborníkem. Povšimněte si prosím data uvedeného na balení baterií, které udává jejich životnost. Nepoužívejte baterie s prošlým datem. Protože jde o Zinc Air (zinek vzduch) baterie, potřebují ke své funkci vzduch. Neodstraňujte proto nálepku z baterie dřív, nežli ji budete vkládat do sluchadla. Jakmile je jednou nálepka odstraněna, začne baterie po několika vteřinách pracovat. Životnost baterií závisí na mnoha faktorech, jako například na nastavení a denní době používání sluchadel, na zvukovém prostředí, ve kterém se uživatel se sluchadly nejčastěji pohybuje.

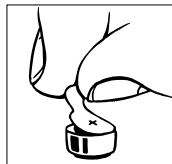


### Vložení baterie


Před vložením nové baterie do sluchadla nezapomeňte z baterie odstranit nálepku. Nepoužívejte baterie, na kterých jsou lepidivé zbytky, protože mohou ucpat vzduchové otvory baterie.

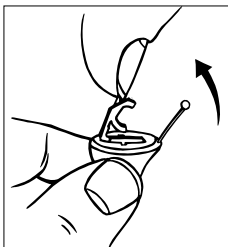

Pomocí výstupku pro nehet jemně otevřete zásuvku pro baterii. Při otevírání víčka baterie buďte opatrní a netlačte na víčko násilím přes kolmou otevřenou polohu.

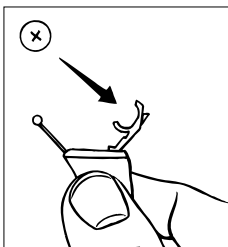

Baterii vložte do zásuvky tak, aby strana baterie se značkou (+) směřovala nahoru ke stejné značce (+) na kulatém držáku baterie. Pokud zásuvku pro baterii nelze zavřít lehce, je baterie vložena nesprávně.

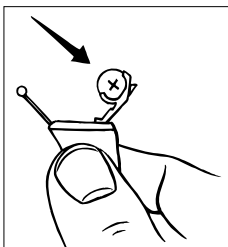

**Vždy vkládejte baterii do zásuvky pro baterii a ne do otevřeného prostoru uvnitř sluchadla.**

## Výměna baterie


Když zaslechnete ze sluchadla čtyři rychlé tóny, znamená to, že baterie je téměř vybitá a měli byste ji co nejdříve vyměnit. Pokud je baterie vybitá úplně, sluchadlo zcela ztichne. Jak dlouho bude ještě sluchadlo po zaznění těchto tónů pracovat, záleží případ od případu. Doporučujeme nosit u sebe vždy náhradní baterii.

Pokud chcete změnit hlasitost signalizace vybité baterie, nebo tuto funkci vypnout, obraťte se na Vašeho sluchadlového odborníka.


Nikdy nenechávejte vybitou baterii ve sluchadle. Pokud by vybitá baterie trochu vytékala, mohla by poškodit sluchadlo. Výměnu baterie provádějte nejraději nad stolem, nebo v místnosti s kobercem, baterie se jinak může zakutálet.

## Vypínání a zapínání sluchadla

---

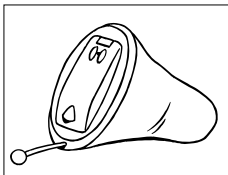

Pouzdro baterie sluchadla Inteo slouží zároveň i jako vypínač. Sluchadlo je zapnuté, když je baterie vložena správně a pouzdro baterie je zcela zavřené.

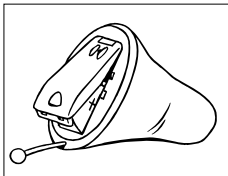

Sluchadlo je vypnuté, je-li pouzdro baterie otevřené.

Nezapomeňte prosím vypnout sluchadlo, když ho nepoužíváte. Pokud nebudete sluchadlo opět brzy užívat, vyjměte z něj baterii.


## Rozeznání levého a pravého sluchadla

---

Nosíte-li sluchadla v obou uších, je snadné je rozlišit, neboť pravé sluchadlo má červený nápis Widex a levé sluchadlo modrý.


## Vkládání sluchadla Inteo do ucha

---

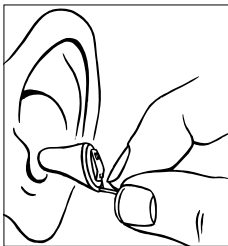


Před vložením do zvukovodu musíte vložit do bateriového pouzdra baterii a zavřít jej.

Sluchadlo držte mezi palcem a ukazováčkem za koncovku na vytahování sluchadla. Pomalu vložte sluchadlo do zvukovodu až ucítíte odpor. Pusťte koncovku na vytahování sluchadla a pomocí ukazováčku upravte sluchadlo jemně ve zvukovodu.

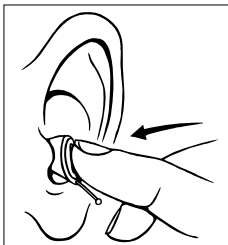

Pro snadnější vkládání si můžete pomoci druhou rukou potahováním za ušní boltec nahoru a dozadu.

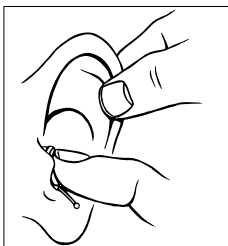


## Stav sluchadla po jeho zapnutí

---

Vaše sluchadlo se po zapnutí může nastavit do jednoho ze dvou režimů. V běžném nastavení může sluchadlo při vkládání do ucha slabě pískat. Druhé možné nastavení zajistí, že při vkládání sluchadla do ucha je pískání potlačeno. Společně se svým sluchadlovým odborníkem můžete vybrat takový režim nastavení sluchadla po zapnutí, který bude nejlépe vyhovovat Vaším potřebám.

## Vyjímání sluchadla Inteo

---

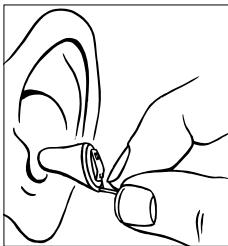

Palcem a ukazováčkem jemně vytahujte koncovku na vytahování sluchadla. Někdy si můžete pomoci během vydávání pohybováním sluchadlem jemně ze strany na stranu. Pomoci si můžete také druhou rukou jemným tlač-

ním v okolí vchodu do zvukovodu nebo lehkým tahem boltce nahoru a dozadu.

## Automatické nastavení hlasitosti

---

Inteo si nastavuje hlasitost automaticky podle Vašeho zvukového prostředí. Inteo provádí několik tisíckrát za vteřinu analýzu okolí a podle toho přesně nastavuje zvuk. Máte-li Inteo, nemusíte vůbec myslet na nastavení hlasitosti – děje se to zcela automaticky.

**Důležité:** Pokud je hlasitost Vašeho sluchadla příliš silná nebo příliš slabá, pokud jsou reprodukovány zvuky zkreslené, nebo potřebujete nějaké další informace, obraťte se na svého sluchadlového odborníka, u něhož jste obdrželi sluchadlo.

## Jemné doladění hlasitosti

---

U Vašeho sluchadla Inteo není možné provádět běžným způsobem jemné doladění hlasitosti. Sluchadlo je tak malé, že zde není prostor pro umístění regulátoru hlasitosti a je umístěno tak hluboko ve zvukovodu, že není možné jakýkoli regulátor ovládat.

Nicméně, pokud používáte Vaše Inteo společně s dálkovým ovladačem (lze si jej dokoupit u Vašeho lékaře), můžete ovladač použít k doladění hlasitosti. Pokud se chcete dozvědět, jaké výhody Vám může nabídnout používání dálkového ovládání, obraťte se na Vašeho sluchadlového odborníka.

## Poslechové programy

---

Vaše Inteo má běžně jeden poslechový program. Sluchadlo je tak malé, že zde není prostor pro umístění přepínače programů a je umístěno tak hluboko ve zvukovodu, že není možné tento přepínač ovládat.

Nicméně, pokud používáte Vaše Inteo společně s dálkovým ovladačem (lze si jej dokoupit u Vašeho lékaře), můžete využívat až tři poslechové programy upravené pro různé poslechové situace.

Váš sluchadlový odborník Vám pomůže vybrat si programy, které jsou pro Vás užitečné. Pokud budete potřebovat po čase změnu, je možné kombinaci poslechových programů změnit. V tomto návodu jsou programy, které Vám sluchadlový odborník může zařadit do sluchadla a umožnit přepínat (viz strana 22). Můžete si vybrat z následujících programů:

---

**Inteo Master:** Tento poslechový program je běžným programem sluchadla Inteo. V Master programu pracují všechny automatické funkce sluchadla tak, aby zajistily slyšitelnost, srozumitelnost řeči a komfort ve všech poslechových situacích.

**Přivykání:** Tento poslechový program má stejné rysy jako Master program, je nastaveno pouze menší zesílení. Tento poslechový program je vhodný pokud je Inteo Vaším prvním sluchadlem a chcete si na všechny nové zvuky zvykat postupně. \*

**Hudba:** Tento poslechový program je ideální pro poslech hudby. \*

**TV:** Tento poslechový program je vhodný pro poslech televizoru. \*

---

**Komfort:** Tento poslechový program je vhodný pro zajištění komfortu poslechu jak v hlučných, tak v klidných prostředích. \*

**Rozšíření slyšitelnosti:** Tento program je ideální pokud špatně slyšíte vysokofrekvenční zvuky. Program používá speciální obvod, který přesune zvuky s vysokými frekvencemi do slyšitelného frekvenčního pásma. \*

\*Tento program může být zvolen pouze tehdy, pokud používáte Vaše sluchadlo s dálkovým ovládáním.

---

## Poslechové programy

Program	Zvolené programy:	Použití:
1.		
2.		
3.		

---

## Přepínání programů

Pokud používáte Vaše sluchadlo společně s dálkovým ovládním, uslyšíte pípnutí při každém přepnutí na jiný program. Pípnutí Vám napovídají, který program máte zvolen;

Program 1: jedno krátké pípnutí

Program 2: dvě krátká pípnutí

Program 3: tři krátká pípnutí


Počet různých pípnutí závisí na tom, kolik programů jste si nechali ve spolupráci s Vaším sluchadlovým odborníkem ve Vašem sluchadle nastavit. Zvolené poslechové programy jsou očíslovány od 1 do 3.

Pokud se později po konzultaci se svým sluchadlovým odborníkem rozhodnete pro jinou kombinaci programů, můžete si je zapsat do prázdných formulářů, které jsou na konci tohoto návodu.

## Čištění sluchadla Inteo

---

Vaše sluchadlo Inteo IN-CIC je nitroušní sluchadlo, které se nosí ve zvukovodu.

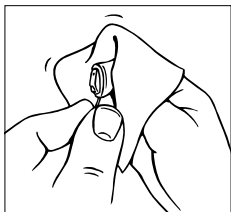


Pro jeho správný provoz je velmi důležitá každodenní kontrola a čištění. Nikdy nemyjte sluchadlo vodou, čisticími roztoky nebo jinými tekutinami. Místo toho vyčistěte své sluchadlo každý den

měkkým suchým hadříkem tak, aby bylo suché a bez nečistot, zbytků ušního mazu a podobně. Doporučujeme pokaždé, když vyjmete sluchadlo z ucha, abyste pozorně prohlédli zvukový výstup, otvory pro mikrofon a odvětrávací kanálek, zdali nejsou zaneseny nečistotou.

---

Níže je příklad rozmístění zvukového výstupu, ventilačního otvoru a otvoru pro mikrofon. Na tomto obrázku je znázorněno sluchadlo s **krátkým ventilačním** otvorem. Tato ventilace se používá u sluchadel Inteo IN-CIC. U Vašeho sluchadla se může rozmístění mírně lišit.


1. Zvukový výstup
2. Ventilační otvor – krátká ventilace
3. Otvor pro mikrofon

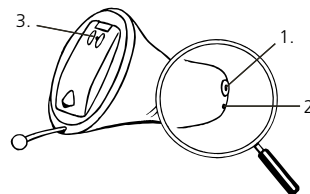

---

Níže je jiný příklad rozmístění zvukového výstupu, ventilačního otvoru a otvoru pro mikrofon. Na tomto obrázku je znázorněno sluchadlo s **průchozí ventilací**. U Vašeho sluchadla se může rozmístění mírně lišit.

1. Zvukový výstup
2. Výstup ventilačního otvoru – průchozí ventilace
3. Vstup ventilačního otvoru – průchozí ventilace
4. Otvor pro mikrofon

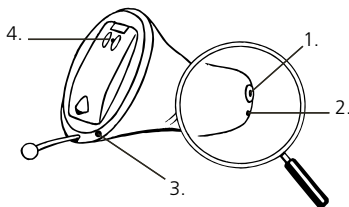

---



### Příslušenství pro čištění

Pro Vaše sluchadlo jsou k dispozici následující prostředky pro čištění. Zeptejte se Vašeho sluchadlového odborníka, které příslušenství je pro Vaše sluchadlo vhodné:

1. **Magnet na baterii** pro snadnější vkládání baterie do bateriového pouzdra.
2. **Čistící nástroj pro čištění** ventilačního otvoru (průchozí ventilace) – nedodává se.
3. **Čistící nástroj pro čištění** krátké ventilace (delší konec) a pro čištění mikrofonního otvoru (kratší konec).
4. **Malý kartáček** pro odstraňování ušního mazu z oblasti okolo zvukového výstupu.
5. **Jemný hadřík** pro sušení a čištění sluchadel.

---

Další příslušenství je k dispozici u Vašeho sluchadlového odborníka, kde jste sluchadlo získali.

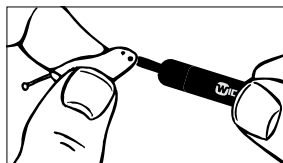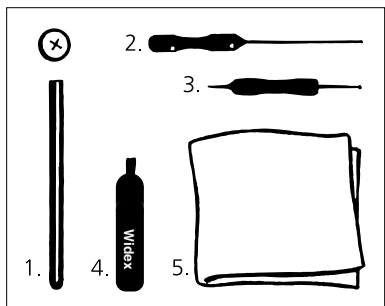


### Zvukový výstup

Jestliže se ušní maz nahromadí okolo zvukového výstupu, pak je nutné ho očistit pomocí kartáčku. Pro dobrou funkčnost sluchadla je velmi důležité, aby tento výstup nebyl ničím ucpan.

**Důležitá poznámka:** Nevsunujte cokoliv do zvukového výstupu, protože může dojít ke zničení sluchadla!

Vaše Inteo může být vybaveno speciálním filtrem proti mazu CeruSTOP, který zabraňuje vnikání ušního mazu do zvukového výstupu.(viz strana 34).

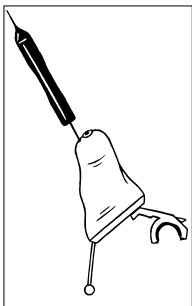

### **Ventilační otvor, krátký**

Ventilační otvor umožňuje odvětrávání zvukovodu. Vaše Inteo je vyrobeno s krátkou ventilací, ventilační otvor neprochází celým sluchadlem.


Jestliže se ušní maz nahromadí okolo otvoru odvětrávacího kanálku nebo v něm, pak je nutné ho také odstranit. Použijte delší konec čistícího nástroje číslo 3.

Otevřete zásuvku baterie a baterii vyndejte, aby nevypadla až otočíte sluchadlo. Sluchadlo obraťte vzhůru nohama tak, aby zásuvka baterie směřovala dolů a ušní maz mohl vypadnout ze sluchadla. Vyčistěte nečistoty z ventilačního otvoru tak daleko, jak může dosáhnout čistící nástroj.

Pro dobrou funkčnost sluchadla je velmi důležité, aby toto odvětrání nebylo nikdy ucpáno. Zvykněte si čistit ho každý den! Jestliže je ale odvětrání ucpáno mazem, který nejde odstranit, změní se barva zvuku ze sluchadla. Pak prosím kontaktujte svého sluchového odborníka nebo servis.


## Ventilační otvor, průchozí

Pokud má Vaše sluchadlo průchozí ventilaci, prochází ventilační otvor celým sluchadlem, z jednoho konce na druhý. Jestliže se ušní maz nahromadí okolo otvoru odvětrávajícího kanálku nebo v něm, pak je nutné ho také odstranit. Použijte dlouhý čistící nástroj číslo 2.

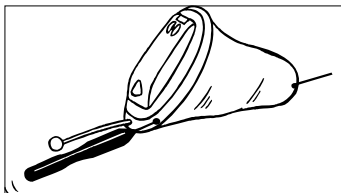

Veškerý ušní maz odstraníte z odvětrávacího otvoru prostrčením přípravku skrz. Pro dobrou funkčnost sluchadla

je velmi důležité, aby toto odvětrání nebylo nikdy ucpano. Zvykněte si čistit ho každý den! Jestliže je ale odvětrání ucpano mazem, který nejde odstranit, změni se barva zvuku ze sluchadla. Pak prosím kontaktujte svého sluchového odborníka nebo servis.

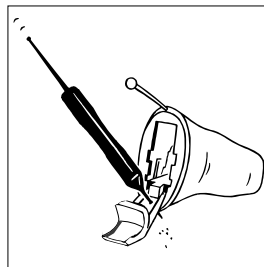

## Mikrofonní otvor

Někdy se maz může usazovat i u otvoru pro mikrofon na zevní straně sluchadla. Je velmi důležité tento maz odstranit krátkým koncem čistícího nástroje číslo 3. Otevřete zásuvku


baterie a baterii vyndejte. Sluchadlo obraťte vzhůru nohama, aby zásuvka baterie směřovala dolů. Zevnitř zaveďte krátký konec čistícího nástroje skrz otvor pro mikrofon podle obrázku.

**Nevsunujte nic do vlastního mikrofonu.**


## Filtr proti mazu CeruSTOP

System filtru proti mazu CeruSTOP sestává z následujících částí:

1. Držáček
2. Odstraňovací háček
3. Filtr proti mazu

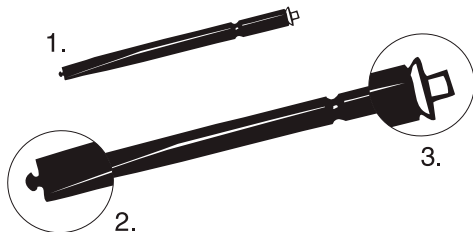


Filtry CeruSTOP jsou dodávány v malé krabičce. Filtr je připraven na jednom konci držáčku.

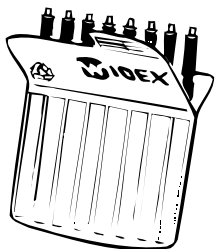

## Výměna filtru CeruSTOP


Povrch sluchadla očistěte od viditelných zbytků ušního mazu. Použitý filtr proti mazu je v kovovém kroužku kolem zvukového výstupu sluchadla. Přiložte šedý držáček kolmo k ploše kovového kroužku a vsuňte vytahovací háček dovnitř použitého filtru, až se násadka držáčku dotkne okraje filtru. Potom filtr pomalu vytáhněte rovně ven. Filtr není potřeba z kovového kroužku vydloubávat nebo vytáčet.

1. Ventilační otvor
2. Zvukový výstup
3. Použitý filtr

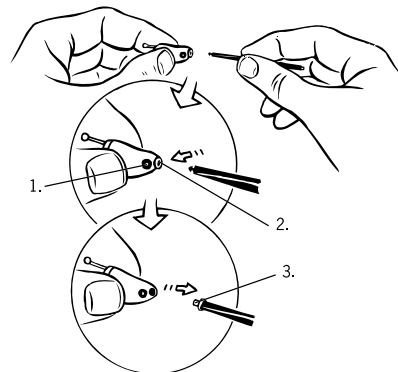





Nyní otočte šedý držáček opačně použitým filtrem od sluchadla a novým filtrem směrem ke sluchadlu.

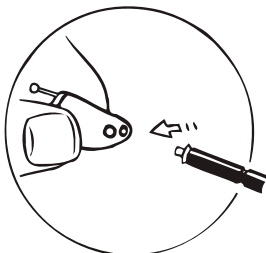

Jemně zamáčkněte nový filtr přímo do otvoru zvukového výstupu. Netlačte filtr do zvukového výstupu násilím. Vnější okraj filtru musí dosednout po celém obvodu na kovový kroužek.

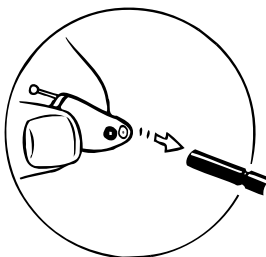

Potom držáček vytáhněte rovně ven. Držákem neotáčejte. Nový filtr se automaticky oddělí od držáčku a zůstane na svém místě ve sluchadle.

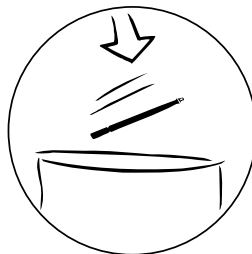

Po vložení nového filtru držáček se starým filtrem vyhoďte. Nikdy znovu nepoužívejte již jednou použité filtry.

Jak často by měl být CeruSTOP vyměňován záleží na mnoha individuálních okolnostech, například na množství a typu produkovaného ušního mazu.

I při používání filtru CeruSTOP je potřeba sluchadlo denně čistit.

**Upozornění:** Pokud se filtr uvolní a vypadne, když máte sluchadlo nasazené ve zvukovodu, navštivte ihned svého lékaře. Nesnažte se odstranit filtr ze zvukovodu sami.




Pokud máte jakékoli nejasnosti týkající se filtru proti mazu, spojte se se svým sluchadlovým odborníkem.

## Péče o Vaše sluchadlo

---

Při dobré péči bude Vaše sluchadlo spolehlivě sloužit řadu let. Zde je několik zásad, které prodlouží životnost Vašeho sluchadla:

- Vypínejte sluchadlo, když ho nepoužíváte. Pokud byste ho delší čas nepoužívali vůbec, vyjměte baterii.
- Starejte se o své sluchadlo dle jeho hodnoty, tedy velmi pečlivě. Ukládejte sluchadlo do pouzdra nebo dodané krabičky na suché bezpečné místo, pryč z dosahu dětí nebo domácích zvířat.
- Nikdy sluchadlo nevystavujte extrémním teplotám nebo vysoké vlhkosti.
- V prostředích s vysokou vlhkostí můžete použít odvlhčovací sadu Widex pro snížení vlhkosti ve sluchadle. Prostudujte si instrukce přibalené k odvlhčovací sadě Widex.

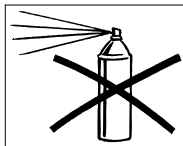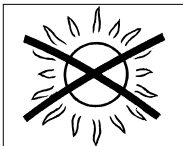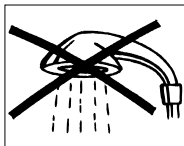

- Nenoste sluchadlo do sprchy nebo při plavání, při používání vysoušeče vlasů či sprejů na vlasy.
- Nikdy se nesnažte rozebírat nebo opravovat sluchadlo sami.
- Nenoste sluchadlo během rentgenového vyšetření, MR nebo CT vyšetření, léčby diatermií nebo během podobných radiačních léčebných procedur a sluchadlo nikdy nevkládejte do mikrovlnné trouby. Některé typy záření mohou sluchadlo poškodit. Interference z různých jiných radiových zdrojů (alarmy, poplašné systémy, mobilní telefony) jsou slabé a zaručeně nepoškodí Vaše sluchadlo.
- Sluchadla Widex nejsou schválena pro používání v dolech a jiných prostorech s výbušnými plyny.

## Několik dobrých rad

---

- Používání sluchadla může vést k formování mazové zátky ve Vašem zvukovodu. Pokud máte podezření, že se mazová zátka ve zvukovodu vytvořila, navštivte svého ušního lékaře. Maz může nejenom zhoršit Váš sluch, ale významně i efekt sluchadla. Proto je vhodné požádat svého lékaře několikrát za rok o vyčištění zvukovodů.
- Sluchadlo a ostatní příslušenství je třeba chránit před dětmi, které by mohly sluchadlo dávat do úst. Také baterie nepatří dětem do ruky. Použité baterie pečlivě vyhazujte. Baterie raději nikdy nevyměňujte před dětmi, neukazujte jim, kde je máte uložené.
- Nikdy nevkládejte baterie do vlastních úst a nikdy nenechte děti brát baterie do rukou. Pokud dojde k polknutí baterie, navštivte ihned lékaře.

- Sluchadla Widex jsou vyrobená z moderních nealergizujících materiálů. Přesto se ve výjimečných případech může objevit podráždění kůže. Pokud zjistíte na uchu, ve zvukovodu, nebo v jeho okolí podrážděnou pokožku, vyhledejte Vašeho sluchadlového odborníka.
- Uvědomte si prosím, že používání jakéhokoli typu sluchadla nebo ušní tvarovky může poněkud zvýšit riziko infekce ve zvukovodu. Infekce může vzniknout horším odvětráním zvukovodu, nebo jeho poškrábáním sluchadlem nebo tvarovkou. Doporučujeme proto sluchadlo/ušní tvarovku na noc vyjmát z ucha, aby se zvukovod provětral. Nezapomeňte sluchadlo/ušní tvarovku pravidelně čistit a kontrolovat podle návodu. Pokud se infekce ve zvukovodu projeví, je dobré vyčistit opatrně sluchadlo nebo ušní tvarovku dezinfekčním nebo podobným roztokem. Za žádných okolností nepoužívejte k čištění sluchadel a ušních tvarovek alkoholové, chlorované nebo podobné prostředky.

## Příslušenství

---

### Dálkové ovládání

#### - jiný způsob ovládání Vašeho sluchadla

Dálkové ovládání je doplňkové příslušenství Vašeho sluchadla. Umožňuje Vám nastavit hlasitost nebo přepínat poslechové programy Vašeho sluchadla.

Můžete si vybrat ze dvou typů ovladačů: základní model a rozšířený model. Pokud se chcete dozvědět, jaké výhody Vám může nabídnout používání dálkového ovládání, obraťte se na Vašeho sluchadlového odborníka.

## Problémy a jejich odstranění

---

Na následujících stránkách naleznete několik stručných rad, které Vám pomohou, narazíte-li na nějaký problém. Před návštěvou svého sluchadlového odborníka si prosím pečlivě tyto rady přečtěte:

### Sluchadlo nehraje:

- *Sluchadlo není zapnuto.* Ujistěte se, že jste baterii vložili do sluchadla správně a víčko bateriového prostoru je dobře zavřené.
- *Baterie nepracuje, je vybitá.* Vložte novou baterii. Ujistěte se, že jste baterii vložili do sluchadla správně a víčko bateriového pouzdra je dobře zavřeno. Je možné si zakoupit tester baterií do sluchadel.
- *Zvukový výstup je ucpaný.* Ušní maz je častou příčinou ucpání zvukového výstupu. Je-li Vaše sluchadlo vybaveno filtrem CeruSTOP, vyměňte filtr. Pokud sluchadlo filtr proti mazu nemá, očistěte zvukový výstup sluchadla malým kartáčkem. Viz strana 28. Nevkládejte žádné špičaté předměty do tohoto otvoru, mohlo by dojít ke zničení sluchadla. Jestliže nemůžete zvukový výstup zcela vyčistit, raději navštivte Vašeho sluchadlového odborníka nebo servis.

- 
- *Bateriové kontakty jsou špinavé.* Navštivte svého sluchadlového odborníka, aby Vám kontakty vyčistil.
  - *Otvor mikrofonu je ucpaný.* Ušní maz nebo nečistota může upcat i vstup mikrofonu. Nevkládejte žádné předměty do vlastního mikrofonu. obraťte se na svého lékaře nebo servis.

#### **Zvuk ze sluchadla je příliš slabý:**

- *Zvukový výstup je ucpaný.* Ušní maz je častou příčinou upání zvukového výstupu. Je-li Vaše sluchadlo vybaveno filtrem CeruSTOP, vyměňte filtr. Pokud sluchadlo filtr proti mazu nemá, očistěte zvukový výstup sluchadla malým kartáčkem. Viz strana 28. Nevkládejte žádné špičaté předměty do tohoto otvoru, mohlo by dojít ke zničení sluchadla. Jestliže nemůžete zvukový výstup zcela vyčistit, raději navštivte Vašeho sluchadlového odborníka nebo servis.
- *Vaše ucho může blokovat ušní maz.* Navštivte ušního lékaře a nechte si vyčistit zvukovod.

---

#### **Sluchadlo píská:**

- *Sluchadlo není dobře umístěno v uchu.* Sluchadlo vyndejte a zkuste znovu vložit. Je velmi důležité, aby sluchadlo „sedělo“ v uchu velmi přesně.
- *Ucho je ucpano ušním mazem.* Navštivte ušního lékaře a nechte si vyčistit zvukovod.
- *Sluchadlo je v uchu příliš volné.* Navštivte Vašeho sluchadlového odborníka nebo servis.

#### **Sluchadlo se špatně nosí v uchu:**

- *Sluchadlo není správně zasunuto do zvukovodu.* Poradte se se svým sluchadlovým odborníkem, jak správně zasunout sluchadlo do zvukovodu.
- *Sluchadlo dobře „nesedí“ v uchu.* Může to být i příčinou otláčení zvukovodu. Navštivte svého sluchadlového odborníka.

- *Boltec nebo zvukovod je citlivý.* Nosíte-li sluchadlo poprvé, nasazujte si ho zpočátku na kratší dobu. Kůže ve zvukovodu je velmi tenká a může při tlaku sluchadla trochu otékat. Doba na adaptaci se odhaduje na 2-3 týdny. Jestliže problém s bolestivým uchem trvá dál, pak neprodleně navštivte svého sluchadlového odborníka nebo lékaře.

#### **Sluchadlo pracuje nepravidelně:**

- *Bateriové kontakty jsou špinavé.* Navštivte svého sluchadlového odborníka, aby Vám kontakty vyčistil.

#### **Poslechové programy**

Program	Zvolené programy:	Použití:
1.		
2.		
3.		

---

### Poslechové programy

Program	Zvolené programy:	Použití:
1.		
2.		
3.		

---

### Poslechové programy

Program	Zvolené programy:	Použití:
1.		
2.		
3.		





### **Záruční a pozáruční opravy:**

**WIDEX SERVIS, Společná 6  
182 00 Praha 8, tel.: 286 580 396**

**ZAHRADNÍK Lubomír, Výstavní 17  
603 03 Brno 3, tel.: 543 184 150**

**CE 0459**

**Widex, DK-3500 Vaerloese  
Denmark · [www.widex.com](http://www.widex.com)**



**Printed by FB / 06-06  
9 514 0071 020 #01**