

WIDEX CLEAR™ 330

STAY IN SYNC WITH LIFE

NÁVOD K POUŽITÍ
ŘADA CLEAR™ 330

C3-9

Závěsné sluchadlo

VAŠE SLUCHADLO WIDEX CLEAR™330

(Vyplní lékař)

Datum: _____

Typ baterie: _____

OBSAH

SYMBOLY	4
SLUCHADLO	5
Rozlišení pravého/levého sluchadla.....	8
Zvuková signalizace	8
Baterie.....	9
Vložení baterie.....	9
Zapnutí a vypnutí sluchadla	12
Nastavení hlasitosti.....	13
Poslechové programy.....	16
Telefon+.....	20
Telefonování.....	21
Nasazení sluchadla	22
Sundání sluchadla	23
Čištění	24
PŘÍSLUŠENSTVÍ	26
PROBLÉMY A JEJICH ODSTRANĚNÍ	29
PÉČE O VAŠE SLUCHADLO	31
VAROVÁNÍ	32
INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ SLUCHADEL	35
INFORMACE PRO ÚŘADY	36

SYMBOLY

Následující symboly budou používány v celém tomto návodu:



Zprávy s tímto záhlavím (Varování) označují vážné nepříznivé účinky, potenciální bezpečnostní rizika nebo chybnou funkci zařízení.



Zprávy s tímto záhlavím (Upozornění) označují nebo obsahují informace, na které je nutno reagovat se zvýšenou pozorností.




 Nevhazujte do běžného odpadu.

SLUCHADLO

Na obrázku níže je zobrazeno sluchadlo bez ušní sady.

1. Mikrofonní vstupy
2. Regulátor hlasitosti
3. Tlačítko pro přepínání programů
4. Vypínač
5. Bateriové pouzdro s výstupkem pro nehet

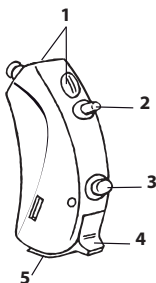

POZNÁMKA

Společně s tímto návodem k použití je k dispozici také uživatelská příručka o různých typech ušních sad, které jsou pro Vaše sluchadla k dispozici: „Ušní sady pro závěsná sluchadla Widex“.



VAROVÁNÍ

Tento návod a příručka „Ušní sady pro závěsná sluchadla Widex“ obsahují důležité informace a instrukce. Přečtěte si tyto brožury pozorně, dříve, nežli začnete svá sluchadla používat.

POZNÁMKA

Vaše sluchadlo, ušní sada a příslušenství nemusí vypadat přesně podle obrázků v této příručce. Rovněž si vyhrazujeme právo na provedení jakýchkoliv nezbytných změn.

Účel použití

Sluchadla CLEAR jsou určena pro celodenní používání ve všech zvukových prostředích jako pomůcky pro zesílení zvuků. Sluchadla CLEAR mohou mít doplňkový program Zen, který vytváří relaxační zvukové pozadí (například hudební nebo šumové) pro dospělé, kterým se takové zvukové podbarvení v tichu líbí.

Indikace k použití

Tato sluchadla jsou indikována pro celý rozsah poruch sluchu od nejlehčích (10 dB HL) až po těžké ztráty sluchu (90 dB HL), pro všechny typy nedoslýchavostí.


Musí být předepsána a seřizena sluchadlovými odborníky (lékař foniatrie a ORL, audiolog), vyškolenými v oboru rehabilitace sluchu, kteří mají atest na předepisování sluchadel.

Popis sluchadla

Vaše sluchadlo CLEAR™ se používá s ušní sadou, která se skládá z hadičky a z ušní koncovky. Tato sluchadla používají patentovanou bezdrátovou technologii WidexLink, která zajišťuje komunikaci mezi levým a pravým sluchadlem a mezi sluchadly a příslušenstvím DEX.

Vaše sluchadla CLEAR mohou být podle přání vybavena doplňkovým programem Zen. Tento program přehrává na pozadí harmonické hudební zvuky (nebo šumové ruchy). Tyto zvuky jsou přizpůsobeny Vaší sluchové ztrátě.

Rozlišení pravého/levého sluchadla

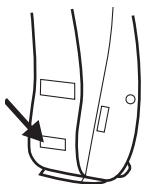

Šipka ukazuje polohu identifikační značky (červená značka = pravé sluchadlo a modrá značka = levé sluchadlo).

Zvuková signalizace

Sluchadlo může být nastaveno tak, aby vydávalo signál, který oznamuje používání určitých funkcí. Tímto signálem může být hlasová zpráva nebo tóny nastavené lékařem po konzultaci s Vámi. Tuto signalizaci je rovněž možné vypnout.

Nastavení hlasitosti		Tón *	Vypnuto
Potvrzení použití tlačítka programů		Cvaknutí	Vypnuto
Změna programu	Zpráva	Tóny	Vypnuto
Zapnutí sluchadla	Zpráva	Tón	Vypnuto
Varování - slabá baterie	Zpráva	4 tóny	Vypnuto
Varování - ztráta komunikace s druhým sluchadlem	Zpráva		Vypnuto
Připomenutí servisu	Zpráva		Vypnuto

* tučné písmo označuje standardní nastavení

Baterie

Doporučujeme používat baterie typu **zinek-vzduch**. Pro Vaše sluchadlo používejte baterii **velikosti 13**.

Potřebujete-li náhradní baterie, obraťte se prosím na svého lékaře. Je důležité věnovat pozornost datu použitelnosti a doporučením pro likvidaci použitých baterií, která jsou uvedena na obalu baterie. Jinak hrozí nebezpečí, že životnost baterie může být snížena.



Vložení baterie

Před vložením nové baterie do sluchadla nezapomeňte z baterie odstranit nálepku. Po odstranění nálepky začne baterie po několika vteřinách pracovat.




UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte baterie, pokud jsou na nich lepkavé zbytky z nálepky nebo jiné nežádoucí materiály, protože to může mít za následek nesprávnou funkci sluchadla.



Pomocí výstupku pro nehet jemně otevřete pouzdro baterie.

Baterii vložte do pouzdra tak, aby symbol plus pólu (+) směřoval nahoru. Pro snadnější vložení baterie můžete použít magnet, který je součástí balení.

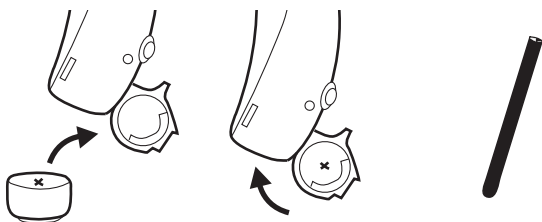

Pokud nejde pouzdro baterie dovřít, je baterie vložena nesprávně.

Výměnu baterie doporučujeme provádět nad stolem.

Sluchadlo může být vybaveno speciálním pouzdrům baterie, díky kterému je baterie v pouzdru lépe zajištěna. Tento typ pouzdra doporučujeme zejména, pokud sluchadlo bude používat dítě.

Signalizace slabé baterie

Je-li baterie již téměř vybitá, ozve se zvukový signál – pokud tato funkce není vypnuta (viz strana 8). Doporučujeme, abyste měli vždy připravenou náhradní baterii.



VAROVÁNÍ

Nikdy nenechávejte vybitou baterii ve sluchadle. Vybité baterie mohou vytéci, což by mohlo sluchadlo poškodit.



VAROVÁNÍ


Vaše sluchadlo může přestat fungovat, například pokud dojde k vybití baterie. Na tuto možnost byste měli vždy pamatovat, zejména pokud se pohybujete v silničním provozu nebo musíte sledovat jiné výstražné signály.

Zapnutí a vypnutí sluchadla

Pouzdro baterie sluchadla slouží zároveň jako vypínač.



Sluchadlo zapnete zatlačením vypínače směrem nahoru. Zapnutí sluchadla bude indikováno zvukovým signálem, pokud tato funkce nebyla vypnuta.

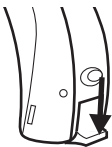

Zatlačením vypínače směrem dolů sluchadlo vypnete.




Je-li sluchadlo vypnuté, je na vypínači zřetelně vidět nápis „OFF“ (vypnuto).

Pokud sluchadlo nepoužíváte, nezapomeňte jej vypnout. Jestliže nebudete sluchadlo používat několik dnů, baterii vyjměte.

Nastavení hlasitosti

Sluchadlo si nastavuje hlasitost automaticky podle okolního zvukového prostředí.

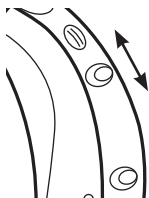

Vaše sluchadlo může být rovněž vybaveno regulátorem hlasitosti ve tvaru páčky.

Pro zvýšení hlasitosti tlačte na páčku směrem nahoru.

Pro snížení hlasitosti tlačte na páčku směrem dolů.

Pokud nosíte sluchadla na obou uších, změna hlasitosti na jednom sluchadle se projeví na obou sluchadlech.

Možnost změny nastavení velikosti kroku, po kterých se zvyšuje nebo snižuje hlasitost, konzultujte se svým lékařem.

Při jakékoli změně hlasitosti uslyšíte pípnutí, pokud tato funkce nebyla vypnuta. Při dosažení maximální nebo minimální úrovně hlasitosti bude znít stálý tón.

Úplné vypnutí zvuku

- Poté, co se při snižování hlasitosti ozve stálý tón, přidržete páčku nastavení hlasitosti stisknutou směrem dolů.

Opětovné zapnutí zvuku

- stiskněte páčku směrem nahoru nebo
- změňte poslechový program nebo
- sluchadlo vypněte a znovu zapněte.

Jakékoli nastavení hlasitosti bude zrušeno při vypnutí sluchadla nebo změně programu.

Pokud chcete vypnout možnost nastavovat hlasitost, obraťte se prosím na svého lékaře.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je hlasitost sluchadla obecně příliš vysoká nebo příliš nízká, pokud jsou reprodukovány zvuky zkreslené nebo potřebujete jakékoli další informace, obraťte se na svého lékaře.

Ztlumení sluchadla pomocí dálkového ovladače:

Držte stisknuté tlačítko pro snížení hlasitosti na dálkovém ovladači, dokud nezazní dlouhý tón. Dalším krátkým stisknutím jednoho z tlačítek pro nastavení hlasitosti, se zvuk opět zapne.

Signalizace přerušení komunikace s druhým sluchadlem

(Poznámka: je k dispozici pouze v případě, že používáte dvě sluchadla a tato funkce byla aktivována Vaším lékařem)

Pokud Vám jedno ze sluchadel spadne z ucha dolů a/ nebo je vybitá baterie, ozve se ve druhém sluchadle dvakrát zvukový signál a hlasová zpráva, a na obou sluchadlech začne blikat světelná dioda.

Po novém nasazení ztraceného sluchadla a/nebo výměně baterie přestane dioda blikat.

Poslechové programy

Vedle hlavního programu Master mohou být ve Vašem sluchadle nastaveny tři další programy a speciální Zen program, označovaný Zen+.

<input type="checkbox"/> Hudba	pro poslech hudby
<input type="checkbox"/> TV	pro poslech TV
<input type="checkbox"/> Komfort	potlačí okolní šum
<input type="checkbox"/> Zvuk zezadu	zvýrazňuje zvuky přicházející zezadu
<input type="checkbox"/> Rozšíření slyšitelnosti	zajišťuje slyšitelnost vysokofrekvenčních zvuků
<input type="checkbox"/> Telefon	pro poslech telefonu
<input type="checkbox"/> T	v tomto programu je příjem zvuku zajištěn pomocí telefonní cívky (T), nikoliv mikrofonom sluchadla (M). Telefonní cívka se používá tam, kde je nainstalován systém indukční smyčky. Zapnete-li program telefonní cívky, uslyšíte konkrétní zdroj zvuku bez okolních zvuků.
<input type="checkbox"/> M+T	v tomto programu se pro příjem zvuku používá mikrofonom sluchadla (M) a telefonní cívka (T).
<input type="checkbox"/> Zen	přehrává náhodně zvolené harmonické tóny. Obsahuje pouze jeden styl.

Kombinované programy	program Master v jednom sluchadle a program Zen, Zvuk zezadu, Rozšíření slyšitelnosti, T, MT nebo Telefon ve druhém sluchadle
<input type="checkbox"/> _____	
<input type="checkbox"/> _____	
<input type="checkbox"/> _____	
<input type="checkbox"/> _____	
<input type="checkbox"/> Zen+	speciální program Zen, který nabízí až tři různé styly Zen
<input type="checkbox"/> Telefon+	pouze pro použití s telefonem. Přenáší telefonní hovor při poslechu na jednom uchu do sluchadla na uchu opačném. Poznámka: ve sluchadle, do kterého je hovor přenášen, je vypnut mikrofon.

Pokud budete potřebovat po čase změnu, je možné kombinaci poslechových programů změnit.

Program Zen je možné používat společně se zesílením zvuku, takže budou slyšitelné okolní zvuky současně s tóny Zen. Případně jej lze používat samostatně (bez funkce zesílení zvuku), pokud nechcete slyšet okolní zvuky.

Dobu, po kterou bude sluchadlo přehrávat tóny Zen, může nastavit Váš lékař podle Vašich požadavků.

Výhody

Program Zen může některým lidem vyhovovat jako relaxační zvukový program. Pokud je program Zen použit v rámci terapie tinitu (ušních šelestů), může uživatel pocítit úlevu od tinitu.



UPOZORNĚNÍ

Používání jednotlivých programů Zen může omezovat poslech okolních zvuků včetně řeči. Tyto programy by neměly být používány v případech, kdy je důležité slyšet okolní zvuky. V takových situacích přepněte sluchadlo na některý jiný program, než je program Zen.




UPOZORNĚNÍ

Pokud pocítíte pokles hlasitosti, snášenlivosti zvuků, méně čistý zvuk řeči nebo zhoršení tinitu, kontaktujte Vašeho sluchadlového odborníka.



UPOZORNĚNÍ

Pokud máte zvolen poslechový program Telefon+, nezapomeňte, že jsou situace, ve kterých je obzvlášť důležité slyšet okolní zvuky.

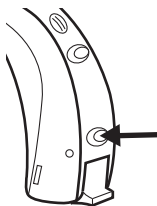

Přepínání poslechových programů

Při každé změně programu se ozve zvukový signál, pokud tato funkce nebyla vypnuta.

Program 1: Zpráva nebo jedno krátké pípnutí

Program 2: Zpráva nebo dvě krátká pípnutí

Program 3: Zpráva nebo tři krátká pípnutí

Program 4: Zpráva nebo jedno dlouhé a jedno krátké pípnutí

Zen+: Zpráva nebo tón

Telefon+: Zpráva nebo tón

Pokud používáte dvě sluchadla, projeví se každá změna programu u obou Vašich sluchadel.

Zen+

Pro aktivaci tohoto programu dlouze (2 s) stiskněte tlačítko programu na sluchadle nebo na dálkovém ovladači RC-DEX. Krátkým stisknutím tlačítka pak můžete přepínat jednotlivé styly Zen.

Program Zen+ opustíte stisknutím tlačítka programu po dobu dvou sekund.


Telefon+

Tento program může být nastaven pokud dlouze (2 s) stisknete tlačítko pro přepínání programů na tom z obou sluchadel, ke kterému budete přikládat telefon.

Program Telefon+ opustíte stisknutím stejného tlačítka programů po dobu dvou sekund.

Chcete-li deaktivovat tlačítko volby programů, obraťte se na svého lékaře.


Telefonování

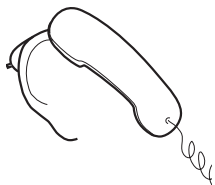


Při telefonování doporučujeme držet telefon u hlavy mírně nad uchem v určitém úhlu, ne přímo na uchu. Pokud není zvuk optimální, pokuste se mírně posunout telefonní sluchátko do jiné polohy.

Nasazení sluchadla

Uchopte sluchadlo za spodní část hadičky a zasuňte tvarovku do zvukovodu. Pomoci si můžete, pokud druhou rukou zatáhnete boltec dozadu a nahoru.

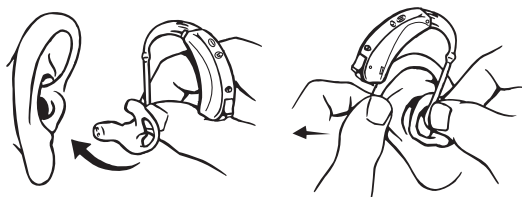


Vložte sluchadlo za ušní boltec tak, aby hák spočíval pohodlně na uchu těsně u hlavy.

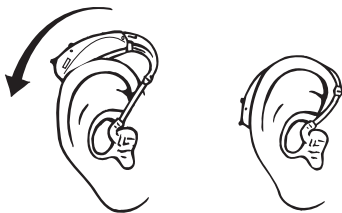


Na obrázku vidíte ušní tvarovku. Další informace o různých typech ušních koncovek a tvarovek, kotvičkách naleznete v samostatné brožurce.

Sundání sluchadla

Vyjměte sluchadlo zpoza ucha.

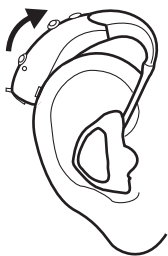

Opatrně vytáhněte tvarovku ze zvukovodu za spodní část hadičky.

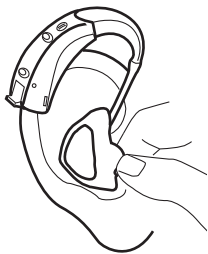


Čištění

Pro čištění sluchadla a ušní sady máte k dispozici následující pomůcky*.

1. Hadřík


2. Nástroj pro odstraňování ušního mazu

3. Čisticí vlákno

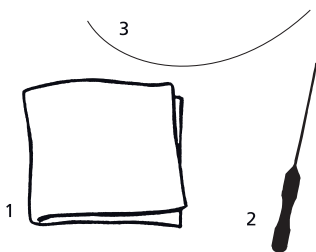

Další příslušenství k čištění sluchadel je k dispozici u Vašeho lékaře.

* Výběr je dán typem ušní sady

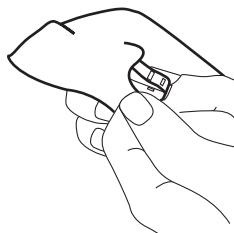


Po použití sluchadlo očistěte měkkým hadříkem.



VAROVÁNÍ

K čištění sluchadla nikdy nepoužívejte vodu nebo čisticí roztok, může dojít k poškození sluchadla.

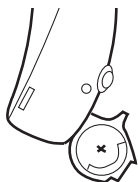

Pokud sluchadlo nepoužíváte, nechte pouzdro baterie otevřené, aby bylo zajištěno větrání a vyschnutí sluchadla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro Vaše sluchadlo je k dispozici celá řada doplňkových zařízení.

- RC-DEX
- TV-DEX
- M-DEX

Chcete-li zjistit, zda by pro Vás bylo používání dálkového ovladače nebo jiného příslušenství výhodné, obraťte se prosím na svého lékaře.

Audio vstup

Sluchadlo může být doplněno tzv. audio botičkou. Ta umožňuje přímé připojení různých druhů příslušenství (FM a CROS/Bi-CROS systémy), jakož i externích audio zařízení (rádio, TV apod.). Takto lze například zvuk z rádia nebo jiného zdroje předat přímo do sluchadla.

Pokud ke sluchadlu připojíte audio botičku, sluchadlo se automaticky přepne do audio programu. Chcete-li přepnout na jiný program, musíte použít tlačítko pro přepínání programů na sluchadle. Jakmile audio botičku odpojíte, sluchadlo se přepne zpět do původního programu.

V tabulce na následující straně může Váš lékař vyplnit audio programy, které máte k dispozici, a jejich pořadí.

Další informace o používání audio vstupu získáte u svého lékaře.

Program	Pořadí programů s audio botičkou
1	
2	
3	
4	



UPOZORNĚNÍ

Pokud je sluchadlo propojeno se zařízením, které je připojené k elektrické síti, musí toto zařízení splňovat bezpečnostní požadavky stanovené mezinárodní normou IEC 60065.

Sluchadlo nepřipojujte do zástrček, které jsou označeny některým z následujících symbolů:



FM systémy

FM systém je pomocné zařízení, které může být používáno jako příslušenství ke sluchadlu.

FM systém společnosti Widex se jmenuje SCOLA. FM systém se skládá z bezdrátového mikrofónu a přijímače připevněného ke sluchadlu pomocí FM botičky.

FM systém SCOLA lze nastavit tak, aby vyhovoval Vaším potřebám. To znamená, že tlačítko programů sluchadla bude při používání audio botičky fungovat jinak než bez audio botičky.

Chcete-li zjistit, zda by pro Vás bylo používání FM systému výhodné, obraťte se prosím na svého lékaře.

PROBLÉMY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Problém	Možná příčina	Řešení
Sluchadlo je úplně tiché	Sluchadlo není zapnuté.	Zkontrolujte, zda je pouzdro baterie zatlačené úplně nahoru.
	Baterie je nefunkční nebo vybitá	Vložte do sluchadla novou baterii
Sluchadlo není dostatečně hlasité	Baterie je téměř vybitá	Vložte do sluchadla novou baterii
	Vaše ucho může blokovat ušní maz	Navštivte ušního lékaře
	Váš sluch se mohl změnit	Obráťte se na svého lékaře
Ze sluchadla se ozývá nepřetržité pískání	Vaše ucho může blokovat ušní maz	Navštivte ušního lékaře
	Hadička je zažloutlá a tuhá	Obráťte se na svého lékaře
	Ušní koncovka/ tvarovka není správně umístěna ve zvukovodu	Vyjměte koncovku/ tvarovku a znovu ji vložte do zvukovodu
	Ušní koncovka/ tvarovka je příliš volná	Obráťte se na svého lékaře
Sluchadlo funguje přerušovaně	Vypínač sluchadla je zanesený.	Sluchadlo několikrát vypněte a zapněte.

Problém	Možná příčina	Řešení
Vaše dvě sluchadla nepracují synchronně	Došlo ke ztrátě spojení mezi sluchadly	Sluchadla vypněte a znovu zapněte
Sluchadla nereagují na stisknutí tlačítka pro změnu hlasitosti nebo programu na ovladači RC-DEX	<ul style="list-style-type: none"> a. RC-DEX je používán za hranicí svého dosahu (> 1 m) b. V blízkosti se nachází silné elektromagnetické pole c. RC-DEX a sluchadla CLEAR nejsou spárovány 	<ul style="list-style-type: none"> a. Přiblížte RC-DEX blíže ke sluchadlům CLEAR b. Opusťte místo se známým zdrojem EM rušení c. Požádejte Vašeho lékaře o kontrolu, zda je RC-DEX spárován se sluchadly CLEAR
Ve sluchadlech je slyšet „přerušovaná“ řeč nebo není slyšet nic při přenosu z druhého sluchadla	<ul style="list-style-type: none"> a. Slabá baterie v jednom ze sluchadel b. V blízkosti se nachází silné elektromagnetické pole 	<ul style="list-style-type: none"> a. Vyměňte baterii v jednom nebo v obou sluchadlech b. Opusťte místo se známým zdrojem rušení

PÉČE O VAŠE SLUCHADLO

Sluchadlo je hodnotný předmět, a mělo by se s ním proto zacházet s náležitou péčí. Zde je několik zásad, které prodlouží životnost vašeho sluchadla:



UPOZORNĚNÍ

- Pokud sluchadlo nepoužíváte, vypněte jej. Jestliže nebude sluchadlo používáno po dobu několika dní, vyjměte z něj baterii.
- Pokud sluchadlo nepoužíváte, uložte je na suché, bezpečné místo, mimo dosah dětí nebo domácích zvířat.
- Nevystavujte sluchadlo působení extrémních teplot nebo vysoké vlhkosti. Po silném zpotení, které může vzniknout například během intenzivní fyzické zátěže při sportu, nezapomeňte sluchadla důkladně vysušit.
- Chraňte Vaše sluchadla před pádem – při čištění nebo výměně baterie držte sluchadla nad měkkým povrchem.
- Nenoste sluchadlo do sprchy nebo při plavání, při používání vysoušeče vlasů, parfémů či sprejů na vlasy.
- V prostředí s vysokou vlhkostí doporučujeme denně používat vysoušecí soupravu Widex pro snížení vlhkosti ve sluchadle. Prostudujte si instrukce přibalené k odvlhčovací sadě Widex.

VAROVÁNÍ



VAROVÁNÍ

Sluchadla nebo baterie mohou být nebezpečné, pokud dojde k jejich polknutí nebo nesprávnému použití. Nesprávné použití nebo polknutí může být příčinou vážného poranění, nebo dokonce úmrtí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékaře.

- Sluchadla a jejich součásti, příslušenství a baterie uchovávejte mimo dosah dětí a dalších osob, které by je mohly polknout nebo se jimi jinak poranit. Výměnu baterií neprovádějte před nimi a zamezte tomu, aby viděli, kde máte uloženy náhradní baterie. S použitými bateriemi nakládejte řádně a důsledně.
- Baterie jsou velmi malé a lze je snadno zaměnit za tablety nebo léky. Nikdy a za žádných okolností nekládejte baterii nebo sluchadlo do úst, protože hrozí nebezpečí spolknutí.



VAROVÁNÍ

- Pokud je baterie nahrazena nesprávným typem nebo nabíjena, hrozí nebezpečí výbuchu. Likvidaci použitých baterií provádějte podle platných předpisů.
- Nikdy nedovolte jiné osobě používat Vaše sluchadlo, neboť by to mohlo způsobit trvalé poškození sluchu dotyčné osoby.
- Při volbě poslechového programu mějte na paměti, že jsou situace, při kterých je velmi důležité slyšet okolní zvuky (např. dopravní provoz, varovné signály).
- Sluchadla Widex jsou vyrobena z moderních nealergizujících materiálů. Přesto se ve výjimečných případech může objevit podráždění kůže. Pokud zjistíte na uchu, ve zvukovodu, nebo v jeho okolí podrážděnou pokožku, vyhledejte Vašeho lékaře.



VAROVÁNÍ

- Uvědomte si prosím, že používání jakéhokoli typu sluchadla může poněkud zvýšit riziko infekce ve zvukovodu. Infekce může vzniknout horším odvětráním zvukovodu, nebo jeho poškrábáním sluchadlem. Doporučujeme proto sluchadlo a ušní sadu na noc vyjímát z ucha, aby se zvukovod provětral. Nezapomeňte sluchadlo a ušní sadu pravidelně čistit a kontrolovat podle návodu. Pokud se infekce ve zvukovodu projeví, je dobré vyčistit opatrně sluchadlo dezinfekčním nebo podobným roztokem. Za žádných okolností nepoužívejte k čištění sluchadel a ušních tvarovek líh, chlor nebo podobné látky.
- Sluchadla Widex nejsou schválena pro používání v dolech a jiných prostorech s výbušnými plyny.



VAROVÁNÍ

- Sluchadlo si vždy odložte před rentgenologickým vyšetřením, vyšetřením magnetické rezonance nebo CT vyšetřením, snímkováním nebo ozařováním. Záření vznikající během těchto procedur, stejně jako ostatní zdroje záření, jako je například mikrovlnná trouba, mohou Vaše sluchadlo poškodit. Záření například ze sledovacích zařízení, poplašných zařízení nebo mobilních telefonů je slabší a pro Vaše sluchadlo není nebezpečné.



UPOZORNĚNÍ

- Vaše sluchadlo bylo testováno na elektromagnetické rušení podle mezinárodních norem. I přesto, se rušení u sluchadla může nepředvídatelně vyskytnout v důsledku elektromagnetického vyzařování jiných výrobků, jako jsou např. poplašné nebo sledovací systémy a mobilní telefony.
- Ačkoli Vaše sluchadlo bylo navrženo tak, aby vyhovovalo i těm nejpřísnějším mezinárodním normám týkajícím se elektromagnetické kompatibility, nelze vyloučit možnost vzájemného rušení s jinými zařízeními, jako jsou například některé lékařské přístroje.
- Nikdy se nesnažte rozebírat nebo opravovat sluchadlo sami.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ SLUCHADEL

POZNÁMKA

- Vaše sluchadlo Vám nikdy zcela nenahradí ztracený sluch, ale pomůže Vám mnohem lépe slyšet a rozumět co říkají ostatní lidé kolem Vás – a vrátí Vám mnoho již zapomenutých zvuků. Samozřejmě přivykání na nové sluchadlo a nové zvuky bude vyžadovat určitý čas.
- Budete-li používat Vaše sluchadla málo a nepravidelně, nemusí Vám přinést ve většině případů takový prospěch, jako při pravidelném používání.
- Používání sluchadel je pouze jednou částí rehabilitace Vašeho sluchu a mělo by být doplňováno poslechovým tréninkem včetně odezírání ze rtů.
- Používáním sluchadel se zvyšuje riziko hromadění ušního mazu. Pokud máte podezření na ucpaní ucha ušním mazem, kontaktujte svého lékaře/ORL lékaře. Ušní maz může způsobit nejenom zhoršení vlastního sluchu, ale i značné zhoršení poslechu ze sluchadla. Proto doporučujeme, abyste svého lékaře několikrát ročně požádali o vyčištění uší.

REGULATORY INFORMATION

Federal Communications Commission and Industry Canada Statement

FCC ID: TTY-C49

IC: 5676B-C49

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with the Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment as per IC RSS-102.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.

CE 0459

Společnost Widex A/S tímto prohlašuje, že C3-9 vyhovuje základním požadavkům a ostatním odpovídajícím ustanovením Směrnice 1999/5/EC.

Kopie Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:
<http://www.widex.com>

 **N26346**



Sluchadla, příslušenství a baterie se nesmí vyhazovat do běžného komunálního odpadu. Pro radu, jak správně likvidovat Vaše sluchadla a baterie, se obraťte na distributora sluchadel Widex.

WIDEX Line Praha
Bohušovická 230/19
190 00 Praha 9
Tel: 286 580 396
servis@widex.cz

WIDEX Line Brno
Zelný trh 293/10
602 00 Brno
Tel: 543 331 630
brno@widex.cz

www.widex.cz

CE 0459

Výrobce

WIDEX A/S • Nymoellevvej 6, DK-3540 Lyngø
Denmark • www.widex.com



Printed by HTO / 2011-06
9 514 0179 020 #01