

PÉČE O ZÁVĚSNÁ SLUCHADLA

(BTE, s tenkou hadičkou)



OTÍREJTE HADŘÍKEM

Sluchadlo každý den otřete přiloženým hadříkem, zbavíte ho nečistot, mastnoty a potu.



VYMĚŇUJTE FILTR

1x za měsíc nebo častěji v případě zanesení filtru ušním mazem. Filtr se nikdy nepokoušejte vyčistit!

*Máte-li univerzální silikonovou koncovku, musíte ji před výměnou filtru sundat a poté opět nasadit.



ČISTĚTE VENT

Odvětrací kanálek (vent) v koncovce se může ucpat ušním mazem, proto jej dle potřeby vyčistěte prostrčením přiloženého nástroje. Některé koncovky vent nemají.



VYSUŠUJTE

Pro prodloužení životnosti sluchadla jej doporučujeme denně vysušovat pomocí elektronického vysušovacího pouzdra, ev. odvlhčovacích tablet.




BATERIE

Ochranný štítek sejměte až před použitím baterie a před vložením do sluchadla ji nechte cca 1 minutu aktivovat.



OSOBNÍ HYGIENA

Pravidelně si čistěte uši, boltce a ušní okolí, sahejte na sluchadlo čistýma rukama, občas si nechte vyčistit zvukovod u svého ORL lékaře či foniatra.

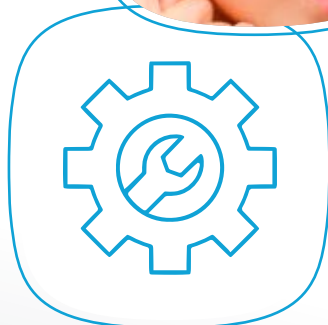

SERVIS

Po dobu 2 leté záruční doby doporučujeme využít zvýhodněné preventivní prohlídky v našem servisu - technik vám sdělí, zda je potřeba se o sluchadlo lépe starat. I poté doporučujeme pravidelnou kontrolu/čištění v servisu.

KDYŽ SLUCHADLO NEFUNGUJE

1. Vložte novou baterii
2. Vyčistěte odvětrací kanálek (vent)
3. Vyměňte filtr
4. Zašlete jej do servisu Widex

CO SE SLUCHADLEM NEDĚLAT

- Nesprchovat se
- Nepoužívat lak na vlasy
- Nenechávat ho na dosah domácích mazlíčků
- Vyhnout se statické elektřině