

# PÉČE O SLUCHADLA S REPRODUKTOREM VE ZVUKOVODU (RIC)



## VYMĚŇUJTE FILTR

1x za měsíc nebo častěji v případě zanesení filtru ušním mazem. Filtr se nikdy nepokoušejte vyčistit!

\*Máte-li univerzální silikonovou koncovku, musíte ji před výměnou filtru sundat a poté opět nasadit.



## OTÍREJTE HADŘÍKEM

Sluchadlo každý den otřete přiloženým hadříkem, zbavíte ho nečistot, mastnoty a potu.

## ZACHÁZEJTE S OPATRNOSTÍ

Hadička obsahuje extrémně jemný kabel, proto s ní nakládejte s citem, nesnažte se ji ohýbat, překrucovat a příliš za ni tahat.



## ČISTĚTE VENT

Odvětrací kanálek (vent) v koncovce se může ucpat ušním mazem, proto jej dle potřeby vyčistěte prostrčením přiloženého nástroje. Některé koncovky vent nemají.



## VYSUŠUJTE

Pro prodloužení životnosti sluchadla jej doporučujeme denně vysušovat pomocí elektronického vysušovacího pouzdra, ev. odvlhčovacích tablet.




## BATERIE

Ochranný štítek sejměte až před použitím baterie a před vložením do sluchadla ji nechte cca 1 minutu aktivovat.



## OSOBNÍ HYGIENA

Pravidelně si čistěte uši, boltce a ušní okolí, sahejte na sluchadlo čistýma rukama, občas si nechejte vyčistit zvukovod u svého ORL lékaře či foniatra.

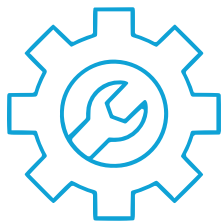

## SERVIS

Po dobu 2 leté záruční doby doporučujeme využít zvýhodněné preventivní prohlídky v našem servisu - technik vám sdělí, zda je potřeba se o sluchadlo lépe starat. I poté doporučujeme pravidelnou kontrolu/čištění v servisu.

## KDYŽ SLUCHADLO NEFUNKUJE SPRÁVNĚ

1. Vložte novou baterii
2. Vyměňte filtr
3. Vyčistěte odvětrací kanálek
4. Zašlete jej do servisu Widex

## CO SE SLUCHADLEM NEDĚLAT

- Nesprchovat se
- Nepoužívat lak na vlasy
- Nenechávat ho na dosah domácích mazlíčků
- Vyhnout se statické elektřině